

MATERASSO IN FIBRA CAVA SILICONATA A 13 TUBOLARI ASPORTABILI *Ref. MA-10FC*



Descrizione

Materasso per la prevenzione del decubito con base in poliuretano espanso ignifugo, realizzato con tubolari in fibra cava siliconata con rivestimento in cotone ignifugato e fodera esterna in materiale bielastico ignifugo classe 1IM, impermeabile, traspirante, antibatterica, antistatica e antimuffa, completa di cerniere su tre lati. L'elevata resilienza del materasso e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza di lesioni da decubito.

Destinazione d'uso

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y033306	
Identificativo di Registrazione	1360961/R	
Codice Classificazione ISO	03.33.06.012	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura C.E.	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore (Nome e numero dell'Ente)	<input type="checkbox"/> SI n/a	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Metodo di sterilizzazione	n/a	
Periodo di validità	n/a	
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2015	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

STRUTTURALI	Dimensioni	Materasso: 85 x 195 x 18 cm
	Composizione	Base del materasso: PU espanso Tubolari: fibra cava siliconata con rivestimento in cotone Fodera: materiale bielastico ignifugo
	Peso	10 kg
	Portata massima	130 kg

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Utilizzare solo coperture traspiranti per proteggere il materasso. In caso di sostituzione dei tubolari usare ESCLUSIVAMENTE ricambi originali IGNIFUGHI. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. In ogni caso attenersi alle istruzioni del manuale d'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Le cerniere laterali consentono di sostituire e lavare ogni singolo tubolare. Tubolari: lavabili in lavatrice a max. 60°C con detergenti neutri. Non candeggiare. Non stirare. Non centrifugare. Fodera: lavabile in lavatrice a max. 95°C con detergenti neutri. Non candeggiare. Non stirare.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
Materasso	Materasso in fibra cava a 13 tubolari asportabili, completo di base in PU	1
Fodera	Fodera bielastica ignifuga	1
Tubolare ignifugo	Tubolare ignifugo di ricambio	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Accessori

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
MA-F10	Fodera bielastica ignifuga	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.