

Nome Prodotto

Sollevatore Passivo Genesis Elettrico.

Codice	Portata (Kg)
01.01.HE900E	180

Destinazione d'uso

I sollevatori passivi permettono il sollevamento da letto/carrozzina/barella di pazienti con importanti limitazioni funzionali.

Descrizione

Il sollevatore passivo GENESIS ELETTRICO è dotato di una centralina TIMOTION, asportabile per poterla ricaricare e collocata sulla colonna portante, telecomando con cavo elettrico, bilancino a 4 punti di aggancio con sistema di sicurezza, maniglione per facilitare lo spostamento, base con 4 ruote pivotanti di cui 2 con freni d'arresto, un pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità, un sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità e un ulteriore sistema elettronico di discesa di emergenza in caso di malfunzionamento del telecomando. Un pedale aziona l'apertura e la chiusura della base.



Codice	Lunghezza	Larghezza	Larghezza Interna Base	Larghezza Esterna Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Altezza Base	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm												
01.01.HE900E	117	70	59/98	70/105	73	159	15	10 (4")	10 (4")	180	36	125x70x40

Gruppo Elettrico	
TIMOTION	24 V
Materiali	
Telaio	Acciaio
Manutenzione e Pulizia	
La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.36.03.006
Codice CND	Y123603
Codice RDM	717207/R

Product Name

Passive Lift Electric Genesis.

Code	Capacity (Kg)
01.01.HE900E	180

Use

The passive lifts allow the lifting from bed / wheelchair / stretcher of patients with important functional limitations.

Description

It is equipped with an TIMOTION control unit (24 V output), removable for charging and placed on the mast, hand remote control, 4 anchor points sling bar with safety system, handle for moving, base with 4 rotating wheels, 2 of which have braking rest, an emergency stop red button that blocks the flow of electricity, a mechanical safety lowering in case of black out and an additional electric safety lowering system in case of malfunction of the remote control. A pedal opens and closes the base.



Code	Length	Width	Internal Base Width	External Base Width	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Base Height	Front Wheels	Rear Wheels	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm												
01.01.HE900E	117	70	59/98	70/105	73	159	15	10 (4")	10 (4")	180	36	125x70x40

Electrical Group

TIMOTION 24 V

Materials

Frame Steel

Maintenance and Cleaning

Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging

Storage and Disposal

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box 1 Piece

Warranty

European 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Product References

Manufacturer Demarta Virginio S.a.S.

Directive 93/42 Class I

ISO Code 12.36.03.003

CND Code Y123603

RDM Code 717207/R