

**RADDRIZZASPALLE SERSE  
(CON RICHIAMO DELLA POSTURA)  
(cod. 125)****Nome Prodotto**RADDRIZZASPALLE SERSE  
(CON RICHIAMO DELLA POSTURA)  
(cod. 125)

REF	Taglie	Misure Torace (da cm a cm)
125	II	60 / 68
	III	68 / 76
	IV	76 / 84
	V	84 / 90
	VI	90 / 98



Colori disponibili: Ecrù.

**Destinazione d'Uso**

Dispositivo indicato per pazienti che sono affetti da cifosi giovanili oltre che nelle patologie minori del rachide dorsale dovute a posture coatte errate (impiegati, studenti).

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

24% Cotone, 24% Viscosa, 23% Elastico, 16% Poliammide e 13% Poliestere.

Elastico morbido, felpato, chiusura con velcro.

**Istruzioni per l'Uso**

1. Infilare le braccia nelle bretelle in modo che l'elastico con il velcro giri verso il dorso
2. Incrociare i due tiranti nel centro del dorso all'altezza dell'angolo basso delle scapole
3. Chiudere sul davanti all'altezza dello stomaco regolando la tensione con il velcro

Si consiglia di indossare il raddrizzaspalle sopra un capo di biancheria intima possibilmente di fibra naturale.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare a mano in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore. Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

**RADDRIZZAPALLE SERSE  
(CON RICHIAMO DELLA POSTURA)  
(cod. 125)****Conservazione**

Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

**Tipo di Confezione**

Confezionato in scatola.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa e Brochure → Raccolta Carta

Raddrizzapalle → Raccolta Indifferenziata

**Garanzia**

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

**Altre Informazioni**

Codice CND: M030501

Codice EMDN: M030501

Codice BD/RDM: 2528927



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902