



GIMA

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

TERMOMETRO DIGITALE VETERINARIA

Istruzioni operative

Istruzioni:

1. Accendere il termometro premendo il tasto. Il termometro emette un segnale acustico; quando questo termina, significa che il dispositivo è pronto per l'uso.
2. Inserire delicatamente la punta del termometro nel retto dell'animale o nel cibo.
3. Nel giro di 6 secondi il termometro emetterà un segnale acustico e visualizzerà la temperatura.
4. Se non viene eseguita qualche altra operazione, lo spegnimento avviene automaticamente dopo 15 secondi.

Specifiche tecniche:

- Temperatura istantanea entro 6 secondi.
- Segnali acustici di indicazione del visore a cristalli liquidi (LCD) e della memoria.
- Visualizza la temperatura sia in gradi Fahrenheit che in gradi Celsius.
- Facilità d'uso.
- Affidabile, igienico e sicuro.
- Si spegne automaticamente dopo 15 secondi.
- Idoneo per misurare la temperatura ad animali quali cane, gatto, maiale, bovini, ecc.

Intervallo di misurazione:

(32,00~44,00)°C, (89,6~111,2)°

Accuratezza:

+/-0,1°C tra 35,00°C e 39,00°C

+/-0,2°F tra 95°F e 102,20°F

+/-0,2°C sotto 35,00°C e sopra 39,00°C

+/-0,4°F sotto 95,00°F e sopra 102,20°F

Tipo di batteria: 2x1,5 V (AAA) CC

Durata della batteria: circa 5000 letture della misura Dimensioni: 190x110x35mm

REF 25588 / KDV-03



Kellyunion Electronics Co., Ltd
No. 114, Five Star Village, Jiangkou Town
Hanjiang District 3511115 Putian, Fujian
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China



Landlink GmbH
Dorfstrasse 2/4, Emmendingen,
79312 Germany

