

**TEST PER LA VISIONE STEREOSCOPICA – TEST FOR
STEREOSCOPIIC VISION – EXAMEN DE LA VISION
STÉRÉOSCOPIQUE – TEST FÜR STEREOSKOPISCHES SEHEN –
TEST PARA LA VISIÓN ESTEREOSCÓPICA – TESTE PARA A VISÃO
ESTEREOSCÓPICA – ΤΕΣΤ ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ –**

إختبار للرؤية المجسّمة

Permette la valutazione della cooperazione fra i due occhi nel formare un'unica immagine a partire dalle due immagini fornite separatamente al cervello da ciascuno dei due occhi.

Può essere impiegato in bambini a partire dall'età di un anno e negli adulti.

METODO E MODO D'USO:

Il test è costituito da una cartolina che mostra 4 figure:

una palla, un pesce, una stella ed un albero.

Sono state scelte immagini comuni che possono essere riconosciute e nominate sia dall'adulto che dal bambino fin dalla prima infanzia.

Al soggetto in esame si chiede di indicare cosa vede sul test osservando i suoi movimenti oculari.

La palla è l'unico elemento che è visibile anche con un solo occhio, gli altri (ognuno di essi è posizionato su differenti livelli di profondità) sono percepiti solo da chi possiede visione binoculare e ha un visus superiore a 2-3/10. Nei bambini cooperanti e negli adulti si presenta la cartolina costituente il test alla distanza di 30 – 40 cm e si chiede di indicare le figure: se viene percepita soltanto la palla il test risulta patologico.

È invece normale se tutte e quattro le figure vengono identificate.

In sintesi:

Risultato positivo:

tutti gli oggetti vengono individuati e nominati

Risultato dubbio:

Viene individuata una sola delle figure

Risultato negativo:

Nessuno degli oggetti tridimensionali viene riconosciuto.

INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL TEST:

sospetto di strabismo, di ambliopia, di riduzione visiva in uno o ambedue gli occhi oppure come test di screening per la visione stereoscopica.

Nel bambino non cooperante è possibile presentare il test e osservare se il bambino cerca di afferrare uno degli oggetti oltre la palla (pesce, stella, albero). Il test è normale se ciò avviene.

Se ciò non avviene il test non può essere considerato sicuramente patologico e potrà essere ripetuto a distanza di tempo.

Importante: in caso di risultato negativo o dubbio si consiglia di eseguire un esame oculistico completo.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.