

## PINZA CON LUCE PER LA RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI - ISTRUZIONI PER L'USO

Assemblaggio/Smontaggio:


1. Per montare la pinza con luce per la rimozione del corpo estraneo, inserire l'estremità della pinza nella sorgente luminosa allineando le mollette sull'estremità della pinza con le scanalature all'interno della sorgente luminosa. Spingere verso il basso e ruotare CON DECISIONE in senso orario fino all'arresto della rotazione. Questo blocca la pinza in posizione e fa accendere la luce.  
NOTA: questo dispositivo è caricato a molla; un montaggio improprio può causare la fuoriuscita della punta della pinza.
2. Per fissare la lente di ingrandimento, montarla sul collo della sorgente luminosa, in modo che la parte superiore della lente sia angolata verso la punta della pinza.
3. Per smontare, spingere verso il basso sulla pinza e ruotare in senso antiorario per rimuovere la pinza dalla sorgente luminosa. La luce si spegne quando la pinza viene rimossa.

Istruzioni per la rimozione del corpo estraneo

1. Controllare l'orecchio o il naso per determinare la posizione del corpo estraneo.
2. Montare la pinza con luce per la rimozione del corpo estraneo secondo le istruzioni.
3. Inserire la punta della pinza con luce fino al raggiungimento del corpo estraneo. Una volta raggiunto, stringere l'impugnatura a molla per afferrare l'oggetto ed estrarlo delicatamente dall'orifizio.
4. Ripetere l'esame otoscopico e determinare la posizione di un'eventuale parte del corpo estraneo restante.
5. Ripetere la procedura fino alla rimozione del corpo estraneo.
6. Rimuovere ed eliminare la pinza monouso.

La punta della pinza con luce per la rimozione del corpo estraneo è un dispositivo monouso. La sorgente luminosa e la lente di ingrandimento sono realizzate per l'uso multiprocedurale. Non smaltire la sorgente luminosa né la lente di ingrandimento. Una sorgente luminosa e una lente sono fornite in ogni scatola del prodotto.

LIGHTED FORCEPS FOR FOREIGN BODY REMOVAL - USER INSTRUCTIONS  
BELEUCHTETE PINZETTE ZUR FREMDKÖRPERENTFERNUNG - GEBRAUCHSANWEISUNG  
FÓRCEPS ILUMINADOS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS - INSTRUCCIONES DE USO  
PINCE ÉCLAIRÉE POUR L'ÉLIMINATION DE CORPS ÉTRANGERS - MODE D'EMPLOI  
PINZA CON LUCE PER LA RIMOZIONE DI CORPI ESTRANEI - ISTRUZIONI PER L'USO  
PINÇA COM LUZ PARA A REMOÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS - INSTRUÇÕES PARA O UTILIZADOR

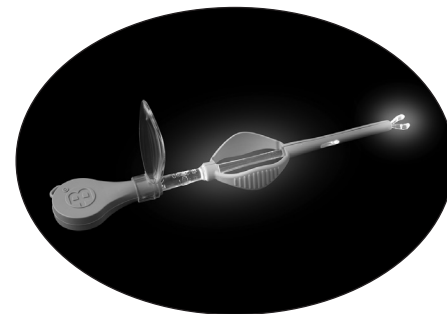

**B** **BIONIX**<sup>®</sup>

+1 419 727 8997

[www.Bionix.com](http://www.Bionix.com)

©2016 Bionix Development Corp.

Rev. 12/5/2016 • RM95-XXXX • Patent Pending



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)



Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.  
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096  
Fax: 800-455-5678 • [www.Bionix.com](http://www.Bionix.com)