


**INSTRUCTIONS FOR CERUMEN REMOVAL**  
**INSTRUCCIONES PARA REMOVER CERUMEN DE LOS OÍDOS**  
**CONSIGNES D'ELIMINATION DU CERUMEN**  
**ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DEL CERUME**  
**ANLEITUNG ZUR ENTFERNUNG VON OHRENSCHMALZ**  
**INSTRUÇÕES PARA REMOÇÃO DE CERUME**

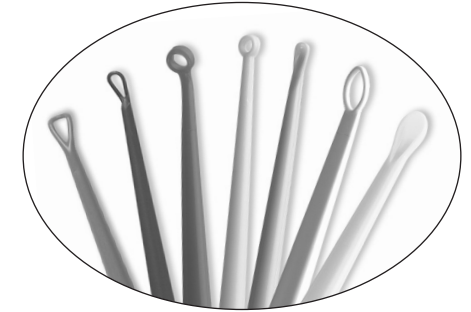

**B** **BIONIX**<sup>®</sup>

**+1 419 727 8997**

**www.Bionix.com**

©2016 Bionix Development Corp.

Rev. 11/30/2016 • RM95-0005 • \*Patented



EC REP

Obelis s.a • Boulevard Général Wahis 53  
1030 Brussels, BELGIUM • Tel: +(32) 2.732.59.54  
Fax: +(32) 2.732.60.03 • E-Mail: mail@obelis.net



Bionix Development Corp. • 5154 Enterprise Blvd.  
Toledo, OH, 43612 • U.S.A. • Phone: 800-551-7096  
Fax: 800-455-5678 • www.Bionix.com

## ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DEL CERUME

Posizionare il paziente comodamente sul lettino. Durante la procedura, i bambini più piccoli possono essere immobilizzati sul grembo di un genitore o sulla spalla.

Con un otoscopio, controllare il canale uditivo e la membrana timpanica, osservando la presenza e la posizione di eventuale cerume nel canale uditivo.

Scegliere una curette da orecchio della misura appropriata per il paziente.  
FlexLoop\*\* Bianco per adulti e bambini, scopo generale;  
InfantScoop\*\* Blu per neonati e bambini più piccoli;  
MicroLoop® Verde per il cerume più duro in adulti e bambini più grandi;  
CeraSpoon\*\* Giallo per la rimozione facile di cerume esteso  
AngleLoop\*\* Rosso per cerume difficile da raggiungere;  
VersaLoop\*\* Viola per una precisione delicata; e  
ControlLoop\*\* Arancione per un controllo e una direzione precisi durante il curettage.

Raddrizzare il canale uditivo tirando delicatamente l'orecchio verso l'alto e lontano dal paziente. Usare delicatamente la curette per ammorbidire e tirare il cerume dal canale uditivo. Usare un otoscopio per riesaminare con frequenza il canale uditivo durante la procedura, in quanto il cerume può cambiare posizione o spostarsi durante il curettage.

Notare la presenza e la posizione di eventuale cerume restante. Ripetere la procedura con la curette fino a rimuovere una quantità di cerume sufficiente a consentire un controllo adeguato della membrana timpanica.

**ATTENZIONE: interrompere immediatamente la procedura con la curette in caso di sanguinamento, irritazione o altri traumi al canale uditivo o alla membrana timpanica.**