



# INTIMATE SWING

Manuale d'uso

SWING  
SWING COMFORT



Scopri la sedia a dondolo che cambia le prospettive!

SWING

La sedia a dondolo che cambia le prospettive del piacere!

SWING COMFORT

Massimo comfort con la versione imbottita della sedia a dondolo Swing.

Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare **Intimate Swing** per scoprire tutte le sue funzioni.


# Indice

<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
Utilizzo	4
Accessori	5
Colori Disponibili	6
Cura e Manutenzione	7
Sicurezza	7
Note Informative	8
Garanzia	9
Dichiarazione Conformità	10
Targhetta e Marcatura CE	11

# Utilizzo

1. Swing è una sedia a dondolo: siediti con attenzione per evitare di scivolare.
2. Quando utilizzi Swing il minimo movimento del busto attiva il dondolio.
3. Per alzare o abbassare la seduta, utilizzare la levetta sottostante, come su una classica sedia da ufficio.
4. Consulta questo manuale per scoprire divertenti posizioni.

**Libera la creatività e lasciati dondolare da Intimate Swing!**

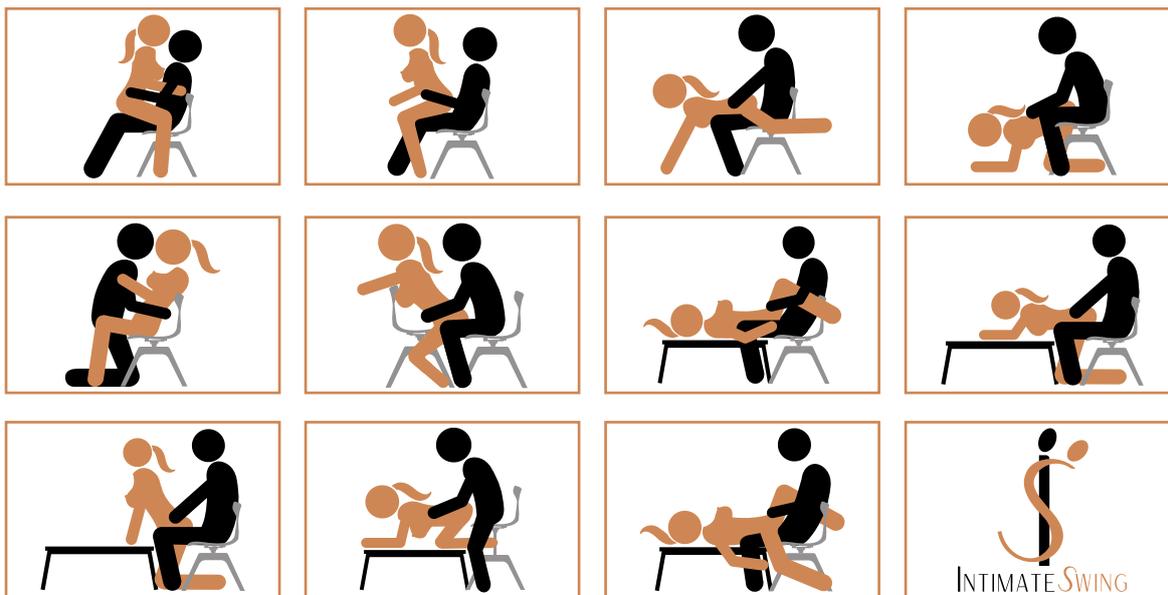

# Accessori

Personalizza la tua Swing con gli accessori abbinati e scopri il piacere di una nuove prospettive!

## Swing Comfort +



Aggiungi comfort e sostegno, permettendo di esplorare nuove posizioni con facilità.

## Cuscino Swing



Ergonomico e traspirante, distribuisce il peso in modo uniforme. La base antiscivolo garantisce aderenza e stabilità.

## Swing Soulmate



Per condividere il piacere, sperimentare nuove posizioni e scoprire tutte le potenzialità di Swing.

# Colori disponibili

Rendi unica la tua Swing e i tuoi momenti di relax, scegli il colore o l'abbinamento che preferisci

## Seduta SWING



Rosso



Antracite



Tortora



Trasp. Rosso



Trasp. Antracite



Trasparente

## Schienale SWING

## SWING COMFORT



Nero



Bianco



Beige



Marrone



Bordeaux

## SWING COMFORT +



Nero

# SWING - SWING COMFORT

Grazie per aver scelto **Intimate Swing** e i suoi accessori.

Questa seduta è progettata e brevettata con un innovativo doppio movimento orizzontale e verticale, che segue il movimento del corpo per guidarti verso nuovi orizzonti di benessere.

## Cura e Manutenzione

- Controllare periodicamente la seduta per assicurarsi che le viti siano ben serrate e le parti mobili siano in ottime condizioni e perfettamente funzionanti.
- Pulire le superfici con un panno morbido e inumidito.
- Il tessuto traspirante degli accessori (**Swing Soulmate** e **Cuscino Swing**) può essere lavato in lavatrice a freddo. Asciugarlo sempre all'aria.

## Sicurezza

- Per evitare arrossamenti nei punti di pressione e di contatto consigliamo l'utilizzo del **Cuscino Swing**.
- Prestare molta attenzione a non toccare le parti in movimento durante l'utilizzo.
- Non utilizzare **Intimate Swing** e i suoi accessori sotto forti getti d'acqua.
- **Intimate Swing** ha una portata massima di **120 kg**.  
*N.B. per l'utilizzo in sicurezza si raccomanda di tenere conto del peso complessivo del utilizzatore o utilizzatori e degli eventuali accessori.*



## Note Informative

### Conformità e Marcatura CE

Il dispositivo descritto in questo manuale riporta il marchio **CE** in quanto conforme ai requisiti previsti dalla legge (leggere le sezioni dedicate in questo manuale).

### Destinazione d'uso

**Intimate Swing** è stata progettata per essere utilizzata in ambienti al chiuso. La seduta viene fornita già montata.

Leggere attentamente il manuale d'uso per l'utilizzo corretto del dispositivo.

### Controlli prima dell'utilizzo

Prima di utilizzare la seduta **Intimate Swing** verificate che tutte le parti siano perfettamente funzionanti e serrate fra loro.

Qualora si riscontrino anomalie o il prodotto presentasse danni visibili, le parti danneggiate devono essere sostituite, per garantire la Vostra e l'altrui sicurezza. Contattare immediatamente il produttore inviando una mail al seguente indirizzo **info@intimateswing.com** specificando il problema o l'anomalia riscontrata.

### Istruzioni per il lavaggio

Non usare apparecchi di pulizia ad alta pressione!

La seduta e gli accessori correlati non devono mai essere puliti con detergenti aggressivi o acidi.

### Durata del dispositivo

La durata della seduta **Intimate Swing** di nostra fabbricazione, dipende dall'intensità di impiego e dalle condizioni di esercizio a cui è soggetta.

Un corretto utilizzo e una adeguata e regolare manutenzione permette di mantenere e prolungare la vita della seduta.



## Garanzia

Sulle sedie **Intimate Swing**, forniamo una garanzia della durata di due anni. La garanzia è valida per i prodotti che presentano difetti di fabbricazione o di funzionamento. Sono esclusi dalla garanzia i prodotti che manifestano difetti dovuti ad incuria o ad un uso improprio. Tramite il nostro punto informazione è possibile ottenere informazioni su preventivi per eventuali riparazioni non in garanzia.



**Attenzione!:** Non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso combinato con accessori e/o complementi non elencati nel presente manuale. Si declina ogni responsabilità per danni a persone, cose, animali e terzi dovuti a modifiche o all'uso improprio dell'ausilio.



**Attenzione!:** Durante l'utilizzo prestare molta attenzione al contatto volontario o involontario degli arti superiori o inferiori con le parti in movimento; **Pericolo** di contusioni o di schiacciamenti.

# Dichiarazione di conformità



Ai sensi del Regolamento UE 2017/745

La ditta BLANDINO Sr.l. con sede legale in C.so Novara, 25 - 10078 - Venaria Reale (TO)  
Tel. 011 2277481 - P.IVA: 12970080011 - [www.blandinocare.it](http://www.blandinocare.it) - [info@blandinocare.it](mailto:info@blandinocare.it)

## DICHIARA

che la seduta "**Intimate Swing**" è conforme ai requisiti previsti dal **Regolamento 2017/745** sui Dispositivi Medici del 5 aprile 2017

### Lo scrivente dichiara inoltre quanto segue:

- Il dispositivo in oggetto soddisfa i requisiti essenziali previsti dall'allegato I del Regolamento 2017/745 e come prescritto dall'allegato IV dello stesso.
- Il dispositivo è da considerarsi appartenente alla classe I.
- Il dispositivo non è uno strumento di misura, non è destinato a indagini cliniche e viene commercializzato in confezione non sterile.

Venaria Reale, 01/03/2025

## Targhetta e Marcatura CE

L'etichetta **CE** (vedi immagine fac simile) è apposta all'interno di una delle gambe frontali.

	 <b>BLANDINO srl</b> Corso Novara 25 10078 Venaria Reale (TO) Partita iva 09642670013 tel.+39 0112277481
MOD _____	_____
	 <b>PORTATA</b> <b>MAX</b>
SN _____	 Dispositivo Medico Classe I Reg. UE 745/2017 



INTIMATE SWING



Rev. 1 del 01/03/25

## Contatti



**Sede:** Blandino Srl C.so Novara, 25  
10078 - Venaria Reale (TO) - ITALY



**Ordini e Commerciale:**  
+39 011 2277481



**Informazioni:**  
info@intimateswing.com



**Sito:**  
www.intimateswing.com