



MOPEDIA®

MA RI900_RI905 02 A* ITA_02-2023

**DISPOSITIVO PER SOLLEVAMENTO
E TRASFERIMENTO PERSONE
MUEVO HOME - MUEVO HOME LIGHT**

MANUALE DI ISTRUZIONI

ITALIANO

INDICE

1. CODICI	PAG.3
2. INTRODUZIONE.....	PAG.3
3. DESTINAZIONE D'USO.....	PAG.3
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE	PAG.3
5. AVVERTENZE GENERALI	PAG.4
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA.....	PAG.4
7. DESCRIZIONE GENERALE	PAG.5
7.1 Descrizione delle parti RI900	pag. 5
7.2 Descrizione delle parti RI905.....	pag. 6
7.3 Descrizione delle parti accessorio RIA910.....	pag. 7
8. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	PAG.7
8.1 Istruzioni di montaggio RI900 e RI905.....	pag. 7
8.2 Istruzioni di montaggio accessorio RIA910.....	pag. 8
8.3 Istruzioni di montaggio per imbracature	pag. 8
9. ISTRUZIONI D'USO	PAG.9
9.1 Istruzioni d'uso sollevapersone RI900 e RI905.....	pag. 9
9.1.1 Istruzioni specifiche per RI905 Apertura/Chiusura gambe	pag. 10
9.1.2 Istruzioni specifiche per RI905 Apertura/Chiusura gambe	pag. 10
9.2 Istruzioni d'uso sollevapersone RI900 e RI905 con braccio di sollevamento RIA910	pag. 11
9.3 Dettagli funzionalità	pag. 11
9.4 Istruzioni d'uso del telecomando.....	pag. 12
9.4.1 Telecomando RI900	pag. 12
9.4.2 Telecomando RI905.....	pag. 13
10. AVVERTENZE.....	PAG.13
11. PULIZIA E SANIFICAZIONE	PAG.13
12. MANUTENZIONE	PAG.14
13. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI	PAG.14
14. CARATTERISTICHE TECNICHE	PAG.14
15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO	PAG.16
15.1 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE.....	pag. 16
15.2 Trattamento delle batterie esauste (direttiva 2006/66/CE)	pag. 16
16. GARANZIA.....	PAG.16
16.1 Garanzia delle batterie ricaricabili.....	pag. 16
16.2 Riparazioni.....	pag. 17
16.3 Ricambi	pag. 17
16.4 Clausole esonerative	pag. 17

CE Dispositivo medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

1. CODICI

RI900 - Sollevalpersone elettrico Muevo Home portata 180 Kg

RI905 - Sollevalpersone elettrico Muevo Home Light portata 135 Kg

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un dispositivo per sollevamento e trasferimento persone della linea **MUEVO HOME by MOPEDIA** di MORETTI S.p.A. Il loro design e la loro qualità garantiscono il massimo comfort, la massima sicurezza ed affidabilità. I sollevatori **MUEVO HOME by MOPEDIA** di MORETTI S.p.A. sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze per un utilizzo pratico e corretto. Questo manuale d'uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell'ausilio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il sollevatore. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. DESTINAZIONE D'USO

I sollevatori della linea **MUEVO HOME by MOPEDIA** sono destinati al sollevamento ed al trasferimento di persone con difficoltà motorie, attraverso l'aiuto di un accompagnatore che aziona i comandi. Non possono essere usati da una persona singola. La MORETTI S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni provocati da un uso improprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa MORETTI SpA. e facenti parte della famiglia **SOLLEVAMALATI MUEVO HOME** sono conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui **DISPOSITIVI MEDICI** del 5 aprile 2017.

A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue:

1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti dall'allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall'allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto **NON SONO STRUMENTI DI MISURA.**
3. I dispositivi in oggetto **NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.**
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione **NON STERILE.**
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto stabilito dall'allegato VIII del suddetto regolamento.
6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità al regolamento 2017/745.

Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.

5. AVVERTENZE GENERALI



ATTENZIONE!

Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali.

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale, dando un particolare attenzione alla Manutenzione e alle avvertenze prima di ogni utilizzo.
- Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare il vostro medico o terapeuta.
- Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l'imballo è fatto di cartone.
- La vita utile dell'accessorio è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili.
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini.
- Non superare la portata massima consentita.
- L'utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA



Codice prodotto



Identificativo univoco del dispositivo



Marchio CE



Fabbricante



Lotto di produzione



Leggere il manuale per le istruzioni



Dispositivo Medico



Condizioni di smaltimento



Attenzione



Data di produzione



Smaltimento prodotto secondo la direttiva CE/19/2012

IP54

Protezione da polvere e spruzzi d'acqua




Parte applicata di tipo B



Peso max supportato

7. DESCRIZIONE GENERALE


7.1 Descrizione delle parti RI900

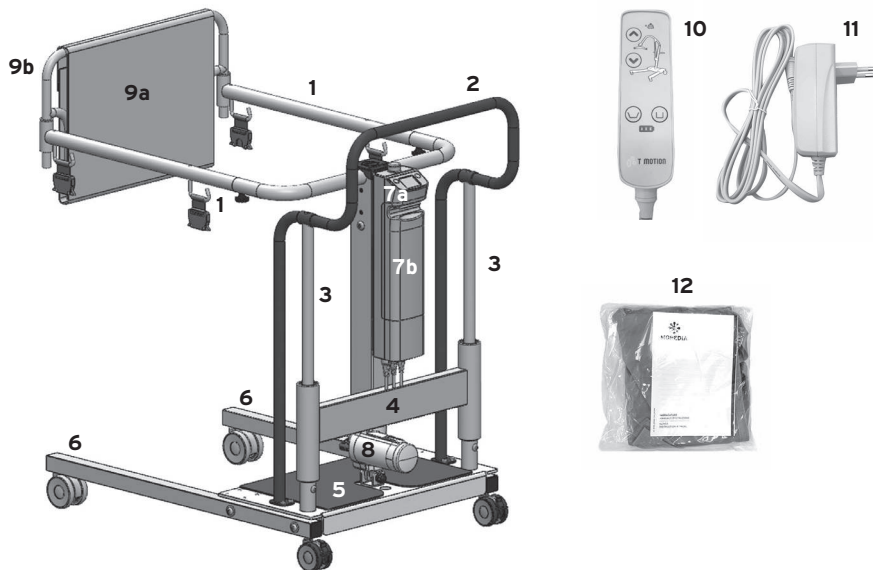

Immagini a scopo illustrativo

1. n.2 Bracci removibili dotati di punti di aggancio per imbracatura con volantino di bloccaggio
2. n.1 Maniglione di spinta
3. n.2 Colonne di scorrimento per sollevamento
4. n.1 Corpo centrale (gruppi di scorrimento con cuscinetti, trave di sostegno, colonna di sostegno, semi-bracci per supporto paziente)
5. n.1 Basamento corredato di:
 - n.1 Tappetino (parte superiore basamento)
 - n.1 Quinta ruota \varnothing 65 mm (parte inferiore basamento)
 - n.2 Attuatori per movimentazione apertura-chiusura gambe (parte inferiore basamento)
 - n.4 Gruppi di scorrimento per movimentazione apertura-chiusura gambe (parte inferiore basamento)
6. n.2 Gambe corredate di:
 - n.2 ruote \varnothing 75 mm senza freno (parte anteriore)
 - n.2 ruote \varnothing 65 mm con freno (parte posteriore)
7. n.1 Centralina (7a) con batteria removibile (7b)
8. n.1 Attuatore di sollevamento
9. n.1 schienale (9a) con n.1 imbottitura schienale (9b)
10. n.1 Telecomando
11. n.1 Caricabatteria
12. n.1 Imbracatura/seduta standard RIA201 completa di cinghie con fibbia e passante per regolazione altezza


7.2 Descrizione delle parti RI905

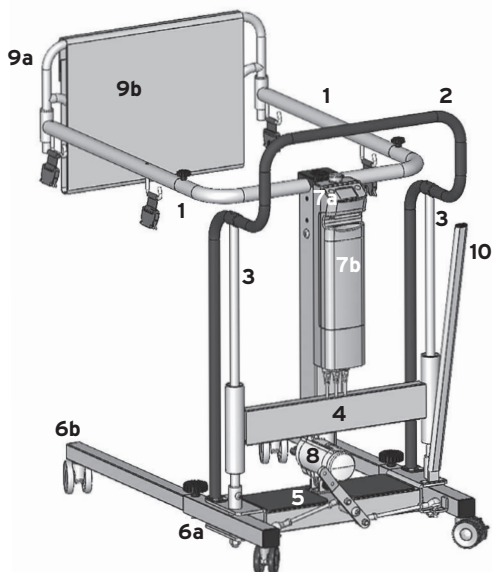

Immagini a scopo illustrativo

1. n.2 Bracci removibili dotati di punti di aggancio per imbracatura con volantino di bloccaggio
2. n.1 Maniglione di spinta
3. n.2 Colonne di scorrimento per sollevamento
4. n.1 Corpo centrale (gruppi di scorrimento con cuscinetti, trave di sostegno, colonna di sostegno, semi-bracci per supporto paziente)
5. n.1 Basamento corredato di:
 - tappetino antiscivolo
 - linguetta porta-leva
 - selettore rotante con 2 tiranti per apertura gambe
6. n.2 Gambe corredate di:
 - parte fissa (6a) con ruote \varnothing 65 mm con freno vincolata al basamento tramite snodo
 - parte smontabile (6b) con volantino di bloccaggio e ruote \varnothing 75 mm
7. n.1 Centralina (7a) con batteria removibile (7b)
8. n.1 Attuatore di sollevamento
9. n.1 Schienale (9a) con n.1 imbottitura schienale (9b)
10. n.1 Leva di azionamento in acciaio per apertura gambe
11. n.1 Telecomando
12. n.1 Caricabatteria
13. n.1 Imbracatura/seduta standard RIA201 completa di cinghie con fibbia e passante per regolazione altezza

7.3 Descrizione delle parti accessorio RIA910

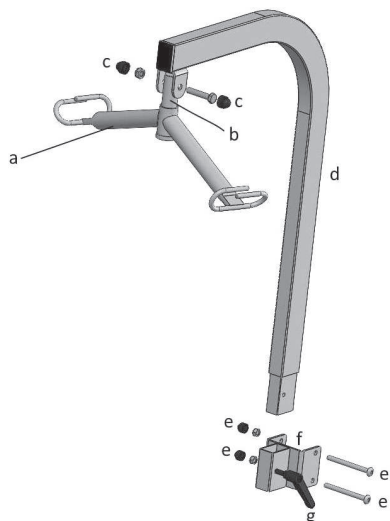





- a. bilancino a 4 ganci
- b. perno di sostegno bilancino
- c. vite per perno b. con dado e cappucci copridado
- d. braccio di sollevamento
- e. viti con dado e copridado per installazione accessorio RIA910 su colonna centrale RI900-RI905
- f. piastra per installazione accessorio RIA910 su colonna centrale RI900-RI905
- g. maniglia di serraggio braccio di sollevamento

Immagine a scopo illustrativo

8. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

8.1 Istruzioni di montaggio RI900 e RI905

1. Aprire il cartone di imballo e verificare che il contenuto corrisponda a quanto indicato nel manuale e che le parti non abbiano subito danni durante il trasporto. Nel caso contrario contattare immediatamente il vostro rivenditore.
2. Prendere i bracci di sostegno paziente con i relativi volantini (fig.a); se i ganci del braccio orizzontale paziente non sono corredati della parte femmina della fibbia, inserire sui ganci le fibbie femmina dotate di cinghietta asolata tramite l'apposita asola come da fig. a1.
3. Inserire i bracci di sostegno del paziente corredati di fibbia femmina (come descritto al punto 2) sulla parte fissa del maniglione di supporto (fig.b). Serrare i volantini di bloccaggio per fissare i bracci (fig.c).
4. Inserire lo schienale nelle boccole verticali poste nella parte terminale dei bracci, spingendolo in basso fino a fondo corsa (fig.d). Corredare lo schienale dell'imbottitura: avvolgere lo schienale e chiudere l'imbottitura con il velcro (fig.e).

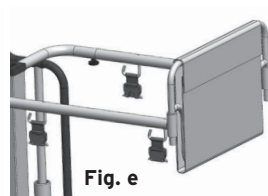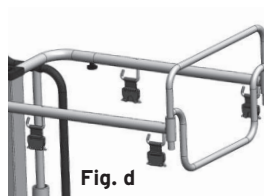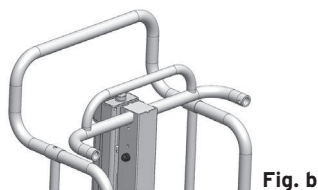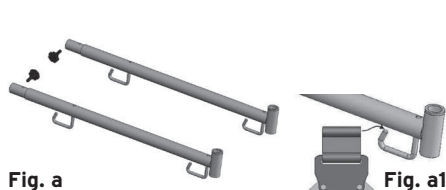

5. Installare la batteria nell'apposito alloggiamento della centralina (fig. f).



Immagini a scopo illustrativo

Fig. f

Il dispositivo è pronto all'utilizzo.

8.2 Istruzioni di montaggio accessorio RIA910



1. Aprire il cartone di imballo e verificare che il contenuto corrisponda a quanto indicato nel manuale e che le parti non abbiano subito danni durante il trasporto. Nel caso contrario contattare immediatamente il vostro rivenditore.
2. Rimuovere i copriforo sugli appositi fori della colonna centrale e installarvi la piastra (rif. f) tramite l'apposita viteria (rif. e)
3. Assemblare il braccio di sollevamento (rif. a, b, c)
4. Installare il braccio di sollevamento sull'apposito alloggiamento nella piastra e serrare tramite la maniglia di serraggio (rif. g) L'accessorio è pronto per l'utilizzo.

Immagine a scopo illustrativo

Nota: per un utilizzo ottimale dell'accessorio braccio di sollevamento RIA910 si consiglia di rimuovere i semi-bracci di sollevamento (rif.1) del RI900 o RI905 svitando gli appositi volantini di serraggio e andando a sfilare i semi bracci stessi; questo consentirà una migliore gestione della persona sollevata da parte degli operatori, sia per le operazioni da eseguire su di essa che per la sua movimentazione.

8.3 Istruzioni di montaggio per imbracature

Le imbracature RIA201 e RIA211 della linea MOPEDIA by Moretti sono adatte ad essere utilizzate con dispositivo di trasferimento e sollevamento persone Muevo Home RI900 e RI905.

Le imbracature RIA201 e RIA211 sono dotate di 4 punti di aggancio (2 per ogni lato) con altezze regolabili tramite fibbie e passanti che, facendole scorrere sulle cinghie, consentono di raggiungere diverse posizioni di regolazione della posizione e dell'altezza da terra della persona con l'imbracatura/seduta. Se i ganci dei bracci orizzontali del dispositivo RI900 o RI905 non sono corredati della parte femmina della fibbia o se ne è necessario sostituirla, inserire sui ganci le fibbie femmina dotate di cinghietta asolata tramite l'apposita asola come da figura di seguito riportata (Fig.i).

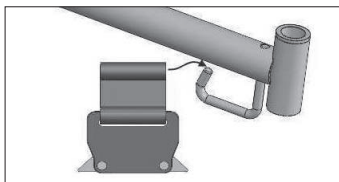


Fig. i

Immagini a scopo illustrativo

Attaccare i punti di aggancio delle imbracature (fibbie con "maschio") con le corrispondenti fibbie "femmina" sul braccio orizzontale secondo i seguenti accoppiamenti: a con A, b con B, c con C, d con D (Fig. ii, iii, iv, v, vi)



Fig. ii

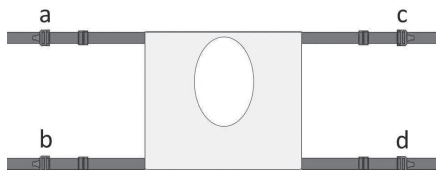


Fig. iii

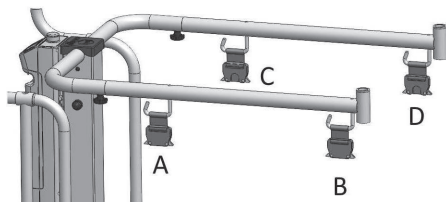


Fig. iv

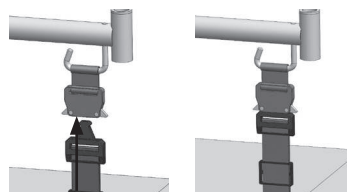


Fig. v

Fig. vi

Immagini a scopo illustrativo



ATTENZIONE!

Riscontro della corretta installazione delle fibbie delle imbracature è il 'click' al momento dell'inserimento della fibbia maschio sulla femmina. Controllare anche manualmente, tirando le cinghie verso il basso, che tutte le fibbie siano correttamente montate.



ATTENZIONE!

Non movimentare il paziente senza che sia installato lo schienale sul dispositivo RI900 o RI905! Avere sempre cura, prima di movimentare la persona, di controllare la corretta installazione della seduta tramite controllo sul corretto aggancio delle fibbie e dello schienale tramite controllo sul completo scorrimento del tubetto inferiore sulla boccola terminale del braccio.

9. ISTRUZIONI D'USO



ATTENZIONE!

AL PRIMO UTILIZZO SI RACCOMANDA DI CARICARE LE BATTERIE PER CIRCA 6/8 ORE. CONSEGUENTEMENTE ACCERTARSI CHE LA BATTERIA SIA CARICA PRIMA DI OGNI UTILIZZO.

9.1 Istruzioni d'uso sollevapersona RI900 e RI905

1. Rimuovere lo schienale sfilandolo dalle boccole verticali dei bracci spingendolo verso l'alto.
2. Avvicinarsi alla persona da sollevare e posizionare il solleva persona quanto più possibile prossimo alla persona da sollevare, eventualmente aprendo le gambe del dispositivo qualora necessario.
3. Prima di sollevare, bloccare i freni delle ruote posteriori.
4. Mantenere la persona centrata tra le gambe della base e sempre rivolta verso chi la assiste
5. Agganciare con cura i punti di aggancio dell'imbracatura ai ganci sui bracci di sollevamento (si veda par. 8.3). Riscontro della corretta installazione delle fibbie delle imbracature è il 'click' al momento dell'inserimento della fibbia maschio sulla femmina. Controllare anche manualmente, tirando le cinghie verso il basso, che tutte le fibbie siano correttamente montate.
6. Installare lo schienale rimosso avendo cura di far scorrere i tubetti inferiori completamente a fondo corsa sulle boccole dei bracci orizzontali.

7. Azionare l'attuatore di sollevamento paziente tramite l'apposito tasto "▲" sulla centralina o sul telecomando, sollevando il paziente all'altezza necessaria, mantenendolo in posizione frontale verso chi lo assiste.
8. Sbloccare le ruote posteriori e trasferire il paziente.
9. Prima di iniziare la discesa della persona imbracata bloccare nuovamente le ruote posteriori
10. Azionare l'attuatore di abbassamento paziente tramite l'apposito tasto "▼" sulla centralina o sul telecomando, abbassando il paziente fino all'altezza necessaria.

NOTA: Durante la normale operatività del solleva persone è possibile aprire o chiudere le gambe del solleva persone elettricamente mediante gli appositi tasti su centralina e telecomando dedicati ad apertura e chiusura gambe. L'operazione di apertura o chiusura gambe può essere effettuata sia con paziente imbracato che a vuoto.


ATTENZIONE!

CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DI SEDUTA DELLA PERSONA SOLLEVATA DURANTE TUTTO IL MOVIMENTO!


Durante la discesa evitare che il paziente possa incontrare un ostacolo che impedisca il movimento in basso dello stesso. In quel caso far salire nuovamente il paziente e rimuovere la causa dell'impedimento della discesa.

9.1.1 Istruzioni specifiche per RI900 Apertura/Chiusura gambe


Per aprire o chiudere le gambe, azionare gli attuatori di apertura gambe tramite i tasti posti in basso nel telecomando. Le gambe sono apribili e chiudibili anche con il paziente imbracato.

9.1.2 Istruzioni specifiche per RI905 Apertura/Chiusura gambe


Per aprire o chiudere manualmente le gambe, sfilare la leva eventualmente situata nella linguetta porta-leva della base, inserire la leva nel selettore centrale e ruotarla manualmente in senso orario (apertura) e antiorario (chiusura); una volta utilizzata è possibile sfilarla nuovamente e reinserirla nella linguetta. Le gambe sono apribili e chiudibili anche con il paziente imbracato.

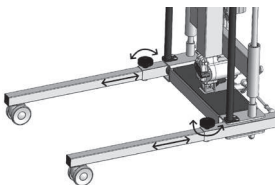
Smontaggio/Montaggio gambe

Svitare e sfilare il volantino passante che unisce la parte fissa alla parte smontabile delle gambe; rimuovere la parte smontabile della gamba. Per ripristinare il montaggio della gamba, posizionare la gamba e inserire il volantino con gambo passante nell'apposito foro, avvitandolo nuovamente.

9.2 Istruzioni d'uso sollevapersona RI900 e RI905 con braccio di sollevamento RIA910

1. Rimuovere lo schienale sfilandolo dalle boccole verticali dei bracci. Per l'uso con l'accessorio RIA910 si consiglia la rimozione dei bracci di sollevamento orizzontali svitando i volantini di bloccaggio e sfilando i bracci stessi.
2. Avvicinarsi alla persona da sollevare e posizionare il solleva persone quanto più possibile prossimo alla persona da sollevare, eventualmente aprendo le gambe del dispositivo qualora necessario
3. Prima di sollevare, bloccare i freni delle ruote posteriori
4. Mantenere la persona centrata tra le gambe della base e sempre rivolta verso chi la assiste
5. Agganciare con cura i punti di aggancio dell'imbracatura ai ganci sul bilancino di sollevamento
6. Azionare l'attuatore di sollevamento paziente tramite l'apposito tasto "▲" sulla centralina o sul telecomando, sollevando il paziente all'altezza necessaria
7. Sbloccare le ruote posteriori e trasferire il paziente
8. Prima di iniziare la discesa della persona imbracata bloccare nuovamente le ruote posteriori
9. Azionare l'attuatore di abbassamento paziente tramite l'apposito tasto "▼" sulla centralina o sul telecomando, abbassando il paziente fino all'altezza necessaria.

NOTA: Durante la normale operatività del solleva persone è possibile aprire o chiudere le gambe del solleva persone elettricamente mediante gli appositi tasti su centralina e telecomando dedicati ad apertura e chiusura gambe. L'operazione di apertura o chiusura gambe può essere effettuata sia con paziente imbracato che a vuoto.



ATTENZIONE!

CONTROLLARE SEMPRE LA CORRETTA POSIZIONE DI SEDUTA DELLA PERSONA SOLLEVATA DURANTE TUTTO IL MOVIMENTO!

Durante la discesa evitare che il paziente possa incontrare un ostacolo che impedisca il movimento in basso dello stesso. In quel caso far salire nuovamente il paziente e rimuovere la causa dell'impedimento della discesa.

9.3 Dettagli funzionalità

FUNZIONE AUTOMATICA ANTI-SCHIACCIAMENTO

Nel kit elettrico è presente una funzione automatica anti-schiacciamento del paziente che blocca la discesa del braccio di sollevamento nel caso di contatto accidentale tra il paziente ed un ostacolo.

STOP DI EMERGENZA

Sulla centralina è presente un pulsante rosso "STOP" (rif. 1) che se premuto disattiva immediatamente tutti i comandi. Per ripristinare il funzionamento ruotare in senso orario il pomello rosso finché questo non scatta verso l'alto e torna in posizione di riposo.



COMANDI DI EMERGENZA

Per RI900. Sulla centralina sono presenti quattro pulsanti (due per la salita/discesa e due per l'apertura/chiusura delle gambe) che possono essere usati al posto di quelli presenti sul telecomando per eseguire delle operazioni nel caso in cui il telecomando stesso manifesti dei problemi di funzionamento, in particolare:

Tasto 1: pulsante a fungo di emergenza di colore rosso

Tasto 3: tasto 'up' per il sollevamento

Tasto 4: tasto per apertura gambe

Tasto 5: tasto per chiusura gambe

Tasto 6: tasto 'down' per l'abbassamento

Immagine a scopo illustrativo



Immagine a scopo illustrativo


COMANDI DI EMERGENZA

Per RI905. Sulla centralina sono presenti due pulsanti che possono essere usati al posto di quelli presenti sul telecomando per eseguire delle operazioni nel caso in cui il telecomando stesso manifesti dei problemi di funzionamento, in particolare:

Tasto 1: pulsante a fungo di emergenza di colore rosso

Tasto 2: tasto 'up' per il sollevamento

Tasto 3: tasto 'down' per l'abbassamento

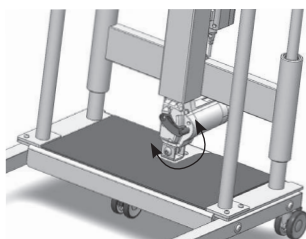

ABBASSAMENTO MECCANICO MANUALE DELL'ATTUATORE

In caso di utilizzo della discesa manuale/meccanica assicurarsi che questa venga effettuata in condizioni di totale sicurezza per il paziente. Per attivare la discesa manuale/meccanica tirare verso l'alto, la leva rossa presente nella parte bassa dell'attuatore e accompagnare in sicurezza l'abbassamento del dispositivo. Una volta terminato l'abbassamento riportare la leva rossa in posizione di riposo.

INDICAZIONE DELLO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

È presente un indicatore a 3 led per lo stato di carica della batteria. Questo indicatore è situato sia sulla centralina (solo per RI900, rif.2 nella foto soprastante "RI900") che sul telecomando (rif. 6 nella foto al par. 9.4.1 e rif. 4 al par. 9.4.2). Tre led accesi indicano una carica completa della batteria, mentre un solo led acceso indica che la batteria è scarica e dobbiamo provvedere a ricaricarla.

COME RICARICARE LE BATTERIE

- Collegare l'adattatore alla presa di rete e quindi all'ingresso della centralina dopo aver tolto il relativo cappuccio di protezione
- Sull'adattatore caricabatteria è presente un led che durante la fase di ricarica è di colore arancio. Caricare la batteria fino a quando il led diventa di colore verde
- Prima di procedere con l'uso del sollevatore ricordarsi di scollegare sempre l'adattatore per ricaricare le batterie!
- Caricare le batterie per almeno 6 ore prima di utilizzare il sollevamali

9.4 Istruzioni d'uso del telecomando

9.4.1 Telecomando RI900

Il telecomando è connesso alla centralina tramite cavo spiralato estensibile.



Tasti sul telecomando:

1. pulsante 'up' per il sollevamento
2. pulsante 'down' per l'abbassamento
3. pulsante per apertura gambe
4. pulsante per chiusura gambe

Segnalazioni sul telecomando:

5. led per indicazione di sovraccarico: il sollevatore ha un dispositivo di controllo del sovraccarico che interrompe il movimento se viene superata la soglia di carico eccessivo e genera un segnale sia visivo che acustico
6. led per segnalazione dello stato di carica della batteria

Immagine a scopo illustrativo

9.4.2 Telecomando RI905

Il telecomando è connesso alla centralina tramite cavo spiralato estensibile.



Tasti sul telecomando:

1. pulsante 'up' per il sollevamento
2. pulsante 'down' per l'abbassamento

Segnalazioni sul telecomando:

3. led per indicazione di sovraccarico: il sollevatore ha un dispositivo di controllo del sovraccarico che interrompe il movimento se viene superata la soglia di carico eccessivo e genera un segnale sia visivo che acustico
4. led per segnalazione dello stato di carica della batteria

Immagine a scopo illustrativo

10. AVVERTENZE

- Il sollevatore è un dispositivo che permette di effettuare brevi trasferimenti di un paziente con difficoltà di movimento come ad esempio da un letto ad una carrozzina o una sedia comoda o viceversa. Il sollevatore non deve essere usato per il trasporto del paziente.
- Durante il sollevamento della persona, assicurarsi che i freni delle ruote posteriori siano bloccati.
- Durante il trasferimento evitate di oltrepassare ostacoli che potrebbero provocare un ribaltamento.
- Con il paziente imbracato, muovere il dispositivo solo con lo schienale montato correttamente



ATTENZIONE!

Verificate sempre il buon stato delle imbracature. Non usare imbracature che presentino segni di danneggiamento o di usura.

Il sollevatore Muevo Home, pur avendo un grado di protezione IP54, non è dedicato all'utilizzo a diretto contatto con liquidi, pertanto porre particolare attenzione alla protezione della strumentazione elettronica di bordo da getti di acqua o altri liquidi.

11. PULIZIA E SANIFICAZIONE

Per la pulizia delle imbracature e della struttura utilizzare un soluzione di alcool e sapone neutro in parti uguali miscelati con acqua.

Per le imbracature e l'imbottitura dello schienale, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:



Temperatura massima di lavaggio 30°C; procedimento normale



Non candeggiare



Non asciugare mediante asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

12. MANUTENZIONE

È estremamente importante che il sollevatore sia controllato prima ogni uso:

- Controllare che tutte le viti e bulloni siano ben stretti e che l'imbracatura, le cinghie e le fibbie siano integri
- Verificare che il sollevatore sia in grado di muoversi liberamente con i freni delle ruote non attivi
- Verificare i freni delle ruote posteriori per un corretto funzionamento
- Le parti meccaniche devono essere lubrificate con un goccio di olio al fine di favorire la scorrevolezza e la resistenza all'usura
- Lubrificare come sopra indicato ogni due o tre mesi

13. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare sempre riferimento al catalogo Master MORETTI.

Accessori

Cod.RIA201 Imbracatura standard (1 pz. fornito di serie con RI900 e RI905)

Cod.RIA211 Imbracatura per WC

Cod.RIA910 Braccio di sollevamento centrale per persone con bilancino ruotabile a 360° a 4 ganci

Se si acquista l'accessorio RIA910, è possibile adottare i seguenti modelli di imbracature per sollevamalatati MUEVO da applicare al bilancino di cui è dotato l'accessorio:

Cod.RP881 Imbracatura standard con poggiatesta 'basic'

Cod.IM100-IM101 Imbracatura standard senza poggiatesta

Cod.IM110-IM111 Imbracatura standard con poggiatesta

Cod.IM120 Imbracatura contenitiva con stecche

Cod.IM140 Imbracatura da toilette senza poggiatesta


Cod.IM141 Imbracatura da toilette con poggiatesta

Cod.IM150 Imbracatura contenitiva per amputati

UTILIZZARE SOLO ACCESSORI ORIGINALI MORETTI. IN CASO DIVERSO SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SU INCIDENTI CAUSATI DA UN UTILIZZO IMPROPRIO.

14. CARATTERISTICHE TECNICHE


Dimensioni struttura RI900

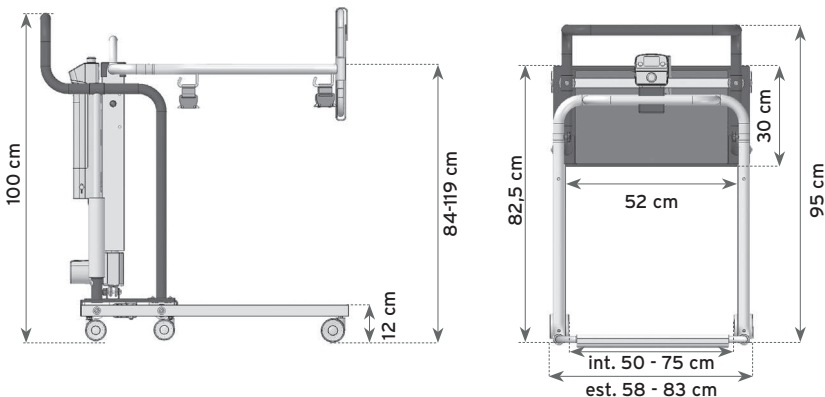

Peso complessivo con struttura e kit elettrico (batteria inclusa): 57 Kg


Portata max: 180 Kg

Con l'imbracatura in dotazione (RIA201, RIA211), è possibile prelevare una persona a partire da un'altezza di circa 25 cm da terra.

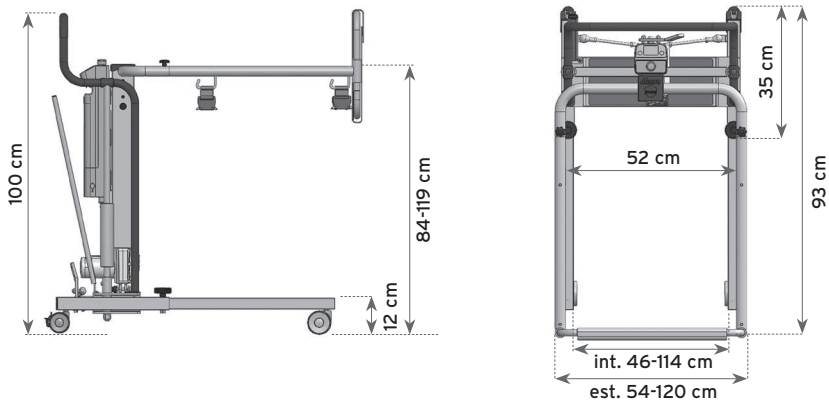Dimensioni struttura RI905


Peso complessivo con struttura e kit elettrico (batteria inclusa): 39 Kg
 Portata max: 135 Kg

Con l'imbracatura in dotazione (RIA201, RIA211), è possibile prelevare una persona a partire da un'altezza di circa 25 cm da terra.

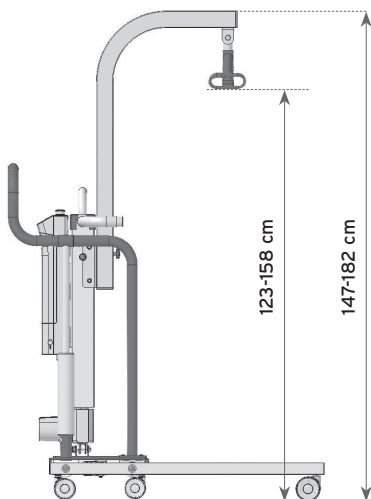Dimensioni struttura RI900 e RI905 con accessorio RIA910


La portata dell'accessorio RIA910 è data dalla portata massima del dispositivo (RI900 o RI905) associato al quale l'accessorio RIA910 viene utilizzato.

Range di temperatura di esercizio RI900 e RI905: +5°C~+45°C

15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di ricircolo dei materiali utilizzati.

15.1 Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente il prodotto consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energie e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente le apparecchiature elettromedicali, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile sbarrato.

15.2 Trattamento delle batterie Esauste (direttiva 2006/66/CE)

Il simbolo sul prodotto indica che le batterie non devono essere considerate come un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le batterie siano smaltite correttamente contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Conferire le batterie esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo. Per in formazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle batterie esauste o del prodotto potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove avete acquistato l'apparecchio.

16. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza alle istruzioni per l'uso. La corretta destinazione d'uso del prodotto è indicata nel manuale d'uso. Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant'altro causato o relativo all'installazione e/o all'uso dell'apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni riportate nei manuali per l'installazione, il montaggio e l'uso. Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi dell'alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l'uso, modifiche non autorizzate, danni di spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.

16.1 Garanzia delle batterie ricaricabili

Le batterie originali e quelle di ricambio sono coperte da una garanzia di 90 (novanta) giorni in relazione alle prestazioni e di 6 (sei) mesi in relazione a difetti di costruzione o secondo quanto richiesto dalle norme di legge. Se si lasciano inutilizzate per più di tre mesi consecutivi batterie completamente cariche, la garanzia viene automaticamente annullata. Se si lasciano inutilizzate per più di tre giorni consecutivi batterie completamente scariche, la garanzia viene automaticamente annullata.

16.2 Riparazioni

Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l'articolo in garanzia, presso un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell'ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia. Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato. Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

16.3 Ricambi

I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.

16.4 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non offre nessun'altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l'uso del prodotto Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all'utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.