

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361</p>	<p>SCHEMA TECNICA</p> <p>Compressa caldo-freddo in gel riutilizzabile</p>	<p>Rev 02 Maggio 2010</p>
---	---	--------------------------------------

Codice	FROST009
Confezione	1 pezzo
CND	M9099
Repertorio	270073

Descrizione

Sacco gelatina riutilizzabile caldo-freddo.

La busta esterna in polietilene garantisce la perfetta termosaldabilità, l'impermeabilità e la resistenza alle alte e basse temperature.

Fornita con bustina protettiva in TNT.

Indicazioni

Impiego in tutti i casi nei quali è consigliata la terapia del freddo e del caldo

Istruzioni per l'uso

Terapia del caldo:

Acqua calda – porre la compressa in acqua bollente per 7 minuti. Estrarre dall'acqua, asciugare, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da trattare.

Microonde – Porre la compressa nel forno a microonde a max. 785-800 Watt per massimo 2 minuti. Estrarre dal forno, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da trattare.

Terapia del freddo:

Freezer – porre la compressa freezer per almeno 1 ½ - 2 ore. Estrarre dal freezer, asciugare, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da trattare.

Dimensioni: cm 14 x24

Avvertenze

Prodotto riutilizzabile esclusivamente per uso esterno.

Contenuto

Anticongelante: Glicole propilenico

Colorante: Blu di metilene

Solidificante: Tylose

Acqua

Scadenza

5 anni dalla data di produzione negli imballaggi originali.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili.

Produttore: Disptech S.p.A. Chiavenna per Intermed S.r.l.

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE