

Codice	Diametro	CND	N. REPERTORIO
<b>CN-100.553</b>	cm 35	V0803	19960/R
<b>CN-100.554</b>	cm 40	V0803	44231/R
<b>CN-100.549</b>	cm 43	V0803	43328/R
<b>CN 100.555</b>	cm 45	V0803	44289/R

**LATEX FREE**

<b>CN 100.579</b>	Pompetta (accessorio optional)
-------------------	--------------------------------

### **Destinazione d'uso**

Il dispositivo ha lo scopo di alleviare la compressione durante la posizione seduta. La ciambella deve essere gonfiata con aria prima dell'uso. E' disponibile una pompetta come accessorio optional.

### **Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.  
Gonfiare il prodotto esclusivamente con aria.  
Non utilizzare su cute lesa.

### **Materiali componenti**

Ciambella           **gomma**  
Valvola             **acciaio**  
Tappo               **plastica**

### **Pulizia e manutenzione**

Non aprire il tappo durante le operazioni di pulizia.  
La superficie esterna può essere pulita con acqua tiepida e un detergente neutro non aggressivo.  
Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.

### **Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione**       1 pezzo

**Garanzia:**        12 mesi per difetti di fabbricazione

**Produttore**     **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE