

## **AVVERTENZE**

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

## **DESCRIZIONE**

Sedile per doccia regolabile in altezza a cinque differenti livelli. Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua. Puntali in gomma antiscivolo.

## **MATERIALI COMPONENTI**

Struttura: alluminio anodizzato  
Seduta: polietilene  
Puntali: gomma antiscivolo

## **DATI TECNICI**

Dimensioni della seduta: **49 x 28 cm**  
Regolazione in altezza: **36-46 cm (\*)**  
Peso: **1,9 kg**  
Portata massima: **120 kg**

(\*) Misurazione rilevata nella parte più bassa della seduta

## **PRECAUZIONI**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre la stabilità del dispositivo.  
Controllare, inoltre, all'atto della regolazione in altezza, l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata.


## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri.  
Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.  
Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma.

## **CONSERVAZIONE**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## **ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

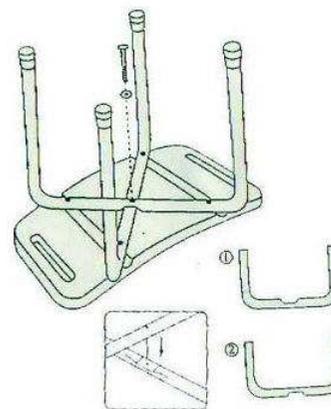

Porre il sedile capovolto su una base piana.


Posizionare le gambe incrociandole negli appositi alloggiamenti. Le gambe e gli alloggiamenti incavi sono contrassegnati dai numeri 1 e 2. Nell'operazione, aver cura di far coincidere gamba ed alloggiamento di numero corrispondente.

Fissare le gambe alla seduta partendo dalla vite centrale.

Assicurare le quattro viti laterali.

Regolare le gambe a seconda dell'altezza desiderata.

Assicurarsi dell'avvenuto fissaggio controllando che le spine di bloccaggio siano centrate nei fori della misura desiderata.

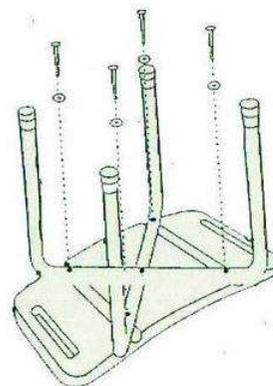

## **GARANZIA**

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

# ISTRUZIONI PER L'USO

**SEDILE  
PER DOCCIA**

**AB-10**



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361  
[www.intermeditalia.it](http://www.intermeditalia.it) • [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)