

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

DESCRIZIONE

Sedile per doccia a muro ripiegabile con gambe ad altezza regolabile. Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua. Puntali in gomma antiscivolo. Il dispositivo viene fornito completamente assemblato e necessita della sola installazione. Le viti ed i tasselli per il fissaggio alla parete non sono inclusi nella confezione.

MATERIALI COMPONENTI

Struttura di supporto per la seduta: acciaio verniciato
Gambe: alluminio verniciato
Seduta: polietilene
Puntali: gomma antiscivolo

DATI TECNICI

Dimensioni della seduta: **41 x 40,5 cm** Peso: **3,9 kg**
Regolazione in altezza: **49-56,5 cm** Portata massima: **120 kg**

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri.
Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.
Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio alla parete del dispositivo nonché lo stato di conservazione dei puntali in gomma antiscivolo.

PRECAUZIONI

Se, durante la fase di installazione, si dovessero verificare rotture o alterazioni della parte predisposta per l'attacco, sostituire immediatamente il prodotto.
Controllare, all'atto della regolazione in altezza delle gambe, l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata.
Assicurarsi che il muro sia idoneo all'applicazione del dispositivo.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE


Attenzione

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

Per installare il sedile sono necessari un trapano con punta per muro, un cacciavite e otto viti con tassello adatte alle caratteristiche della parete ed alle dimensioni dei fori predisposti nell'attacco.

Inserire i piedini nelle gambe del dispositivo e fissare tramite spine di bloccaggio all'altezza desiderata.

Verificare che i piedini siano stati fissati alla medesima altezza.

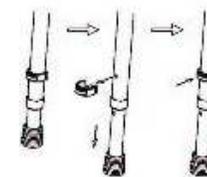


Selezionare attentamente la posizione per il fissaggio alla parete.

Utilizzando il trapano, praticare dei fori nel muro in corrispondenza dei fori esistenti sull'attacco del sedile.


Inserire nei fori realizzati i tasselli delle viti.

Sovrapporre ai fori l'attacco a muro del sedile facendo corrispondere i fori praticati nel muro con i fori esistenti sull'attacco.

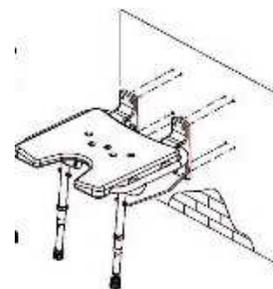

Inserire le viti nei tasselli facendole passare dai fori dell'attacco ed avvitare.

Verificare la tenuta e la stabilità del dispositivo e, se del caso, procedere ad una micro-regolazione in altezza ruotando a seconda delle necessità il puntale in gomma antiscivolo predisposto.

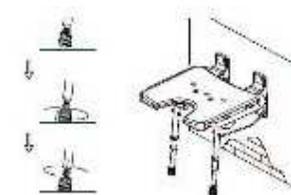

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.
La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEDILE PER DOCCIA A MURO CON GAMBE

AB-61



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 - 20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it