

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

MODELLO AB-93

Sedia da doccia e da comodo con struttura in alluminio e sedile a "catapulta" per favorire i movimenti di seduta ed alzata. Piano seduta, schienale e poggia-braccio in poliuretano morbido. Cinque livelli di regolazione in altezza. Puntali in gomma.

Dimensioni schienale 36 x 26 cm

Dimensioni seduta 42 x 42 cm

Dimensioni foro 16 x 32 cm

Distanza tra braccioli 50 cm

Regolazione in altezza da 52 e 63 cm

Peso 7 kg

Portata 120 kg

MODELLO AB-94

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio. Piano seduta ed imbottiture di braccioli e schienale in poliuretano morbido. Cinque livelli di regolazione in altezza.

Puntali in gomma.

Dimensioni seduta 42 x 42 cm

Dimensioni foro 16 x 32 cm

Distanza tra braccioli 50 cm

Regolazione in altezza da 47 a 60 cm

Peso 6 kg

Portata 120 kg

PRECAUZIONI

Prima dell'utilizzo verificare sempre il corretto fissaggio della seduta. Assicurarsi, inoltre, dell'ideale posizionamento delle clip di bloccaggio nei fori dell'altezza desiderata.

Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità motorie.

Per il solo modello AB-93, prestare particolare attenzione a non sporgersi in avanti in modo eccessivo nelle fasi di alzata. In tali casi, si suggerisce comunque di assistere l'utilizzatore.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.

Verificare periodicamente lo stato dei puntali in gomma nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.

CONSERVAZIONE SMALTIMENTO

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti consumabili.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO LINEA MODERN

- CON SEDILE A CATAPULTA
REGOLABILE IN ALTEZZA
AB-93**
- PIEGHEVOLE
REGOLABILE IN ALTEZZA
AB-94**



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it