



Art. 01378 - GONIOMETRO

APPLICAZIONE

I goniometri vengono utilizzati per misurare, in gradi, il raggio di movimento delle articolazioni attive o passive (ROM).

ISTRUZIONI

1. allineare il fulcro del goniometro con il fulcro dell'articolazione
2. utilizzando le sporgenze ossee come riferimenti, allineare il braccio stazionario del goniometro con il centro dell'arto o dell'estremità che rimane stazionaria durante il moto dell'articolazione
3. tenendo ferme le braccia del goniometro, muovete l'articolazione (attivamente o passivamente) lungo tutto il suo ROM, registrando i punti terminali della flessione e dell'estensione.
4. l'ampiezza compresa tra i punti terminali rappresenta, in gradi, il ROM.