



Misura	Codice
S	CV-003S
M	CV-003M
L	CV-003L
XL	CV-003XL

Indicazioni

- Recupero funzionale in fase post-traumatica.
- Instabilità legamentosa lieve.
- Ripresa di attività sportiva.

Descrizione

- Tubolare realizzato in neoprene per una corretta compressione della caviglia.
- Cinghie di stabilizzazione elastiche con chiusura a velcro per prevenire movimenti in torsione.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della cavigliera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della cavigliera e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della cavigliera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo della cavigliera su altri pazienti.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016
Fax. +39-02-98247361

SCHEDA TECNICA

Rev 00

Luglio 2013

CAVIGLIERA CON FASCE ELASTICHE DI CONTENZIONE

Materiali componenti

Tubolare Neoprene
Cinghie di stabilizzazione Poliestere
Chiusure Nylon

Il neoprene contiene lattice.

Dati tecnici

Modello	Tubolare			Cinghie
	Altezza	Lunghezza alla base	Circonferenza alla tibia	Lunghezza
CV-003S	155 mm	230 mm	110 mm	660 mm
CV-003M	165 mm	230 mm	125 mm	685 mm
CV-003L	190 mm	255 mm	130 mm	715 mm
CV-003XL	190 mm	270 mm	140 mm	745 mm

Modalità di lavaggio



Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore INTERMED srl

Codice CND Y061206
N. Repertorio CV-003S 988206/R
CV-003M 988286/R
CV-003L 988287/R
CV-003XL 988288/R

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE