

Rev. 01  
Novembre 2008



## Scheda tecnica

CN-100.558

Enteroclisma da viaggio



Codice	Descrizione
CN-100.558	Enteroclisma in PVC da viaggio, completo di cannula rettale e vaginale

Indicazioni	
Produttore	FOR.ME.SA Srl
CND	V9002
Repertorio	78843/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

### Indicazioni

Irrigazioni rettali o vaginali utilizzando sostanze liquide a fini purgativi o medicamentosi.

### Descrizione

Sistema per la somministrazione via rettale o vaginale di liquidi terapeutici composto da una sacca con gancio, un tubo trasparente ai cui estremi sono collegati un raccordo per le cannule e un rubinetto, una cannula anale e una cannula vaginale.

### Caratteristiche tecniche

Sacca e tubo:	PVC medical grade
Gancio:	polipropilene
Cannule, raccordo:	polipropilene medical grade
Rubinetto:	polipropilene/policarbonato
Peso:	15 g.
Capacità:	2 l. max.
Lunghezza tubo:	120 cm.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Controindicazioni e avvertenze

Non utilizzare o applicare su parti del corpo umano che presentano lesioni. Non adatto per l'uso pediatrico. Non utilizzare per impieghi diversi da quelli previsti. Non utilizzare il dispositivo senza avere consultato il proprio medico.

Impiegare solo liquidi terapeutici prescritti dal medico curante. Non utilizzare per un periodo superiore a 60 minuti. Non impiegare sostanze non liquide o con viscosità differenti rispetto all'acqua. Non riscaldare i liquidi terapeutici oltre i 35°C.

Pulire accuratamente il dispositivo e i suoi accessori dopo ogni uso.

Non appoggiare il dispositivo su superfici calde. Tenere lontano da oggetti appunti o taglienti.

Non riempire la sacca oltre l'indicatore di livello "2".

## Conservazione

Conservare nella confezione originale in luogo fresco e asciutto al riparo da polvere e da materiali nocivi. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari, a fonti di calore.

## Pulizia

Prima e dopo ogni utilizzo smontare manualmente le parti e lavarle accuratamente con acqua tiepida e detergenti neutri. In caso di necessità disinfettare le cannule con prodotti comunemente in commercio per dispositivi medici.

Non utilizzare prodotti abrasivi, alcool, solventi o acidi.

Le cannule possono essere sterilizzati a raggi gamma, ETO o a vapore.

Lasciare asciugare completamente tutte le parti prima di riporre il dispositivo.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142