

AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l'integrità del dispositivo. Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE

AB-13 Sedile per doccia regolabile in altezza a cinque differenti livelli. Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua. Braccioli estraibili con rivestimento morbido. Puntali in gomma antiscivolo.

AB-21 Sedia per doccia regolabile in altezza a cinque differenti livelli. Seduta ergonomica con fori per il deflusso dell'acqua. Braccioli estraibili con rivestimento morbido. Schienale estraibile a duplice regolazione in profondità. Puntali in gomma antiscivolo.

MATERIALI COMPONENTI

<u>Struttura, braccioli e supporti schienale</u>	Alluminio anodizzato
<u>Seduta e schienale</u>	Polietilene
<u>Rivestimento braccioli</u>	Poliuretano
<u>Puntali</u>	Gomma antiscivolo

DATI TECNICI

<u>Dimensioni della seduta</u>	40 x 33 cm
<u>Regolazione in altezza</u>	40-50 cm
<u>Altezza dello schienale dalla seduta</u>	32 cm
<u>Dimensioni dello schienale</u>	41.5 x 17 cm
<u>Peso</u>	2.8 kg AB-13 - 3.1 kg AB-21
<u>Portata</u>	120 kg

PRECAUZIONI

Prima dell'utilizzo, verificare sempre la stabilità del dispositivo. Controllare, inoltre, all'atto della regolazione di gambe e schienale, l'adeguata centratura delle spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata.


PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali prodotti a base alcolica. Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

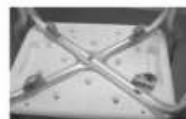

Per il modello AB-21

1. Porre la seduta capovolta su una base piana.
2. Posizionare le gambe incrociandole negli appositi alloggiamenti. Le gambe e gli alloggiamenti incavi sono contrassegnati dai numeri 1 e 2. Nell'operazione, aver cura di far coincidere gamba ed alloggiamento di numero corrispondente.
3. Fissare le gambe alla seduta con la sola vite centrale.
4. Sistemare la sedia in posizione normale ed assicurare i braccioli.
5. Capovolgere nuovamente la sedia e fissare i quattro anelli plastificati contrassegnati a coppie dai numeri 1 e 2. Anche in questo caso aver cura di far coincidere coppie di anelli e gambe di numero corrispondente.
6. Porre lo schienale capovolto su una base piana e fissare le due staffe di sostegno con quattro viti.
7. Inserire e regolare le gambe a seconda dell'altezza desiderata.
8. Inserire e regolare lo schienale a seconda della profondità desiderata.

Attenzione!

Assicurarsi dell'avvenuto fissaggio controllando che le spine di bloccaggio di schienale, braccioli e gambe siano centrate correttamente nei fori della misura desiderata.

Per il modello AB-13

1. Come precedente punto 1.
2. Come precedente punto 2.
3. Fissare le gambe alla seduta utilizzando le cinque viti in dotazione.
4. Come precedente punto 4.

Attenzione!

Assicurarsi dell'avvenuto fissaggio controllando che le spine di bloccaggio di braccioli e gambe siano centrate correttamente nei fori della misura desiderata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl.

ISTRUZIONI PER L'USO

SEDILE PER DOCCIA CON BRACCIOLI ESTRAIBILI AB-13

SEDIA PER DOCCIA CON BRACCIOLI ESTRAIBILI AB-21



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE



Via della Pace, 21 -20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it • info@intermeditalia.it