

shouldfix II



PR2-8412

Immobilizzatore
per braccio e spalla
con tasca gomito
rimovibile

Leggere attentamente
e per intero
le seguenti istruzioni.



9DCFE010301TA02_0812

CARATTERISTICHE



Sacca reggibraccio in tessuto velcrabile, per il massimo range di regolazione



Morbide bretelle velcrate



Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto reticolare

Fascia contenitiva in tessuto velcrabile,
per il massimo range di regolazione

INDICAZIONI

Fratture composte dell'omero

Lussazioni gleno-omerali

Distorsioni della spalla

Trattamento
post-operatorio delle fratture omerali
e negli interventi per lussazione
gleno-omerale

Trattamento
post-operatorio delle tenorrafie
del capo lungo del bicipite omerale

PRECAUZIONI D'USO

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico.

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.



RO+TEN s.r.l.
Sede operativa e amministrativa:
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB)
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34
www.roplusten.com - info@roplusten.com
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI)
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC).
Befinor AG (CH) Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio





RO+TEN
ORTHOSERVICE
INTERNATIONAL PARTNER

Stare
meglio
fa bene

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- 1 Inserire il braccio, corrispondente alla spalla da immobilizzare, nella sacca reggibraccio, facendo attenzione che l'etichetta arancione sia rivolta esternamente e verso l'alto **(A)**.
- 2 Far passare le bretelle sopra le spalle **(B)**, incrociarle sulla schiena **(C)**, riportarle anteriormente, facendole passare sulla sacca reggibraccio, e chiuderle a velcro **(D)**. L'avambraccio deve mantenersi orizzontale, parallelo al terreno.
- 3 Fissare la fascia contenitiva alla sacca reggibraccio mediante l'apposito velcro **(E)**, farla girare attorno al torace (sopra il braccio da immobilizzare e sotto il controlaterale) e chiuderla a velcro su se stessa **(F)**.
- 4 Applicare la fascetta blocca-gomito velcrandola da un lato alla fascia contenitiva e dall'altro alla sacca reggibraccio **(G)**.

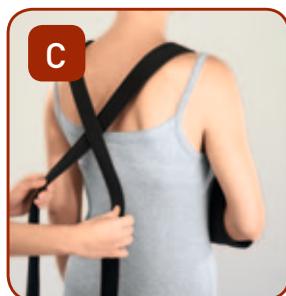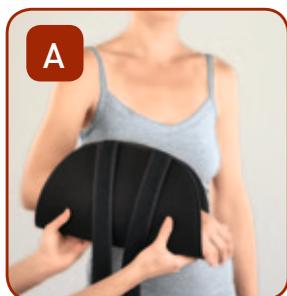

MANUTENZIONE

Istruzioni per il lavaggio:

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.

Non disperdere nell'ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

AVVERTENZE

L'ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso sicuro, in conformità alle esigenze individuali.

Per garantirne l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento è necessario che l'applicazione venga effettuata con la massima cura.

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da un tecnico ortopedico.

Se ne raccomanda l'utilizzo da parte di un solo paziente.

In soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazione qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi immediatamente al proprio medico.

CHI È RO+TEN

RO+TEN da molti anni progetta, sviluppa e realizza dispositivi ortopedici, offrendo una gamma completa di prodotti, riconosciuti di alta efficacia terapeutica.

Continuamente aggiornato sull'evoluzione delle ricerche scientifiche in campo ortopedico ed avvalendosi di un incessante interscambio di informazioni ed esperienze con i medici ed i tecnici ortopedici, lo staff tecnico RO+TEN è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni ergonomiche, tecnologiche e di materiali, per offrire ai pazienti prodotti specialistici d'avanguardia.

L'azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione del suo Sistema di Gestione per la Qualità secondo la normativa ISO 9001 dall'Ente SQS - Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

