

Codice	Misura
A3-35	35
A3-36	36
A3-37	37
A3-38	38
A3-39	39
A3-40	40

Codice	Misura
A3-41	41
A3-42	42
A3-43	43
A3-44	44
A3-45	45
A3-46	46



Indicazioni

Calzatura comoda indicata nel decorso post-operatorio, nel trattamento di lesioni ulcerative, traumi del piede o interventi chirurgici.

Descrizione

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzatura e con chiusura a velcro regolabile. Tomaia in panno lavabile.

Contrafforte semirigido termoformabile e personalizzabile dal tecnico ortopedico.

Suola con struttura monoblocco in mescola orto-assorbente e antiscivolo.

Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di soventi chimici) e con cucitura di tenuta sul bordo suola.

Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Colore nero

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Sicurezza

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenil eteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA

Calzatura fisiologica **ACTIVA 3 in panno**

Rev. 01

Ottobre 2010

Pulizia

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice. Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcol, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi). Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie. Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono del tipo parzialmente ecologico. Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Produttore

INTERMED S.r.l.
Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI)

Codice CND **Y063303**
N. Repertorio **79006**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE