
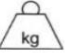



MODULO 2 RUOTE
ROLLATORE
Manuale di istruzioni
DISPOSITIVO MEDICO
RIF. 826038


SIMBOLO SULL'ETICHETTA O NELLE ISTRUZIONI PER L'USO
SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI
SIMBOLO SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI

	Indirizzo del produttore Indirizzo del produttore Indirizzo del produttore		Invito alla consultazione del manuale utente Invito alla consultazione del manuale utente Invito alla consultazione del manuale utente
	Data di produzione Data di produzione Data di produzione		Rispettare le istruzioni di sicurezza Seguire le istruzioni di sicurezza Rispettare le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto Numero di lotto Numero di lotto		Conformità CE Conformità CE Conformità CE
	Riferimento del prodotto Riferimento del prodotto Riferimento del prodotto		Temi l'umidità Non tollera l'umidità Temi l'umidità
	Peso massimo utente Peso massimo utente Peso massimo utente		Dispositivo medico Dispositivo medico dispositivo medico

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle per riferimento futuro.

Utente: Se non sei in grado di leggere o comprendere le avvertenze, le precauzioni o le istruzioni, per favore contattare il proprio medico o il distributore prima di utilizzare questo prodotto poiché ciò potrebbe causare rischi e danni. Consultare il proprio medico o operatore sanitario prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Ti consiglieranno e ti informeranno sull'uso più appropriato per te.

Distributore: questo foglio illustrativo deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

Il Rollator Modulo a 2 ruote è un ausilio per la deambulazione per persone con mobilità ridotta. Questo prodotto è progettato per uso interno ed esterno e si ripiega per riporlo o trasportarlo facilmente.



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può provocare lesioni gravi.

- Non superare il limite di peso massimo di 136 kg.
- Non superare il limite massimo di carico nel cestello (5 kg). I carichi devono essere trasportati solo nel cestello. Non appendere oggetti pesanti sul deambulatore poiché ciò potrebbe comprometterne la stabilità.
- Assicurarsi che tutte le parti (ruote, cavi e maniglie) siano sicure e in buone condizioni.
- Assicurarsi che le manopole siano serrate e alla stessa altezza.
- Non utilizzare il deambulatore su scale o scale mobili.
- Utilizzare solo gli accessori e le parti fornite dal produttore.
- Il deambulatore è un ausilio per la deambulazione. Non è una sedia a rotelle. Non è progettato per trasportare una persona seduta sopra. Tale utilizzo può danneggiare le ruote e la struttura del deambulatore stesso. Ciò potrebbe rendere il deambulatore fragile e non soddisfare i requisiti meccanici per un uso futuro. Utilizzare il deambulatore solo come ausilio per la deambulazione.
- Non utilizzare il deambulatore per camminare all'indietro.
- Non apportare alcuna modifica al deambulatore mentre è in uso.
- Controllare che i freni funzionino correttamente prima dell'uso.
 - Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo.
- Quando il deambulatore è in posizione stazionaria, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il deambulatore se i freni sono bloccati.
- Assicurarsi di mettere le mani su ciascuna maniglia in modo che il deambulatore possa trovarsi in una posizione di forza parallela.
- Fare attenzione quando si sale sui marciapiedi o quando si utilizzano superfici in pendenza, irregolari o scivolose. In caso contrario, si potrebbe verificare un rischio significativo di cadute o lesioni.
- Non utilizzare il deambulatore su pendii bagnati, ghiacciati o innevati.
 - Se qualche parte è danneggiata, rotta o usurata, contattare il rivenditore.

Rimuovere il deambulatore dalla sua scatola e verificare che tutti i componenti siano presenti. Rimuovere tutti gli imballaggi e le coperture protettive. Assicurarsi che tutti i componenti siano in buone condizioni prima del montaggio.



CONTENUTO :

- 1) Maniglia
- 2) Manopola di regolazione dell'altezza
- 3) Bloccare
- 4) Sedile
- 5) Borsa
- 6) piedi

UN. Assemblare il telaio del deambulatore con le ruote anteriori e i piedini posteriori



B. Regolare l'altezza delle maniglie con le manopole di regolazione



C. Accesso alla borsa



REGOLAZIONE ALTEZZA MANIGLIE:

Nota: non rimuovere il tubo interno dal tubo esterno durante la regolazione dell'altezza della maniglia.

- Per garantire che il deambulatore sia all'altezza corretta, stare dietro il deambulatore con le braccia lungo i fianchi. Quindi regolare il altezza della maniglia all'altezza dei polsi dell'utente.

CAMMINARE CON IL ROLLATOR :

- Quando si utilizza il deambulatore, stare in piedi dietro di esso e non piegare la schiena.
- Regolare l'altezza delle maniglie se la posizione di utilizzo non è corretta.

PIEGARE IL ROLLATOR:

UN. Rimuovere il sedile in plastica

B. Sbloccare il supporto del sedile, che è fissato al telaio del deambulatore

C. Riportare le ruote anteriori contro le ruote posteriori.

Il deambulatore Modulo a 2 ruote è progettato per stare in piedi da solo una volta piegato.

PULIZIA - MANUTENZIONE



La mancata assistenza e manutenzione del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

- - Pulite regolarmente il deambulatore con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare abrasivi, detersivi o solventi.
- - Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- - Assicurarvi che non vi siano accumuli di sporco o detriti attorno all'asse, ai freni o alle ruote.
- - Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- - Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cigolano.
- - Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e bulloni. Sostituire immediatamente tutte le parti rotte, danneggiate o usurate.
- - Controllare il funzionamento dei freni prima di ogni utilizzo.
- - Controllare i freni di stazionamento spingendo le maniglie in posizione bloccata e poi tentando di spingere il deambulatore.
- - Se si verifica un malfunzionamento, non riparare da soli il deambulatore. Consultare un rivenditore autorizzato.

• Lista di controllo:

Per mantenere il deambulatore in buone condizioni, controllarlo prima di ogni utilizzo e controllarlo regolarmente come segue

Controlla l'articolo	In qualsiasi momento	settimanalmente	Mensile	Annuale
Clip e pomello per la regolazione dell'altezza	X			
Saldatura strutturale alle ruote		X		
Pulizia				X
Viti e elementi di fissaggio		X		
Stabilità del telaio e dello schienale			X	
Condizioni del sedile			X	
Condizioni delle ruote e delle pastiglie		X		

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le norme igieniche. Durante il trasferimento prodotto, ricordarsi di consegnare al nuovo utente tutta la documentazione tecnica necessaria. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se desideri riciclare il prodotto da solo, chiedi alla tua società locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di lesioni gravi

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o alla luce solare diretta (ad esempio dietro una finestra o vicino ad un termosifone) o vicino ad una fonte fredda, finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme libere e scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto.
- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo prodotto imballando da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salmastra).
- Conservare tutte le parti rimosse insieme, nello stesso posto (o contrassegnarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti pesanti sulle parti del prodotto, non incastrare nulla...).

La durata prevista di questo prodotto è di 5 anni in condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione normali.

utente. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

Se il prodotto viene utilizzato in un ambiente multiutente (ad esempio casa di cura o ospedale), la durata potrebbe ridursi.

Dimensioni	Larghezza 59 x profondità 55 x altezza da 83 a 97 cm in 5 posizioni
Larghezza della maniglia	38,5 cm
Diametro della ruota	12 cm
Massimo. carico per la borsa 1,5 kg	
Peso 4,8 kg	
Peso massimo autorizzato 136 kg	

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contatta il distributore da cui hai acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto per applicare la garanzia.