



LINEA

orione®

Articolo

3085



Categoria commerciale

CORSETTI

Colore di vendita

BEIGE

Comp. Tessile

POLIAMMIDE 69%
ELASTAN 31%

100%



Taglie di vendita

TAGLIE / SIZE				COLORE / COLOUR			
	S	65-74	L	85-94	XXL	105-114	
	M	75-84	XL	95-104			


Lavaggio

Lavare a mano a una temperatura massima di 40 °C.	Il capo non può essere trattato con candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati.	Non stirare.	Non lavare a secco.	Non asciugare nell'asciugatrice.

Istruzioni lavaggio

Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detersivi. Asciugare lontano da fonti di calore e non esporre ai raggi del sole.

Astuccio

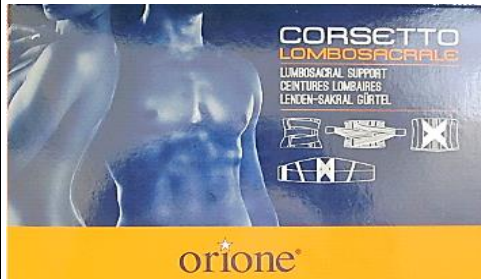

Modalità di applicazione

Estremamente confortevole aderisce perfettamente al corpo. Grazie ai doppi tiranti incrociati sul dorso si può calibrare la tensione. Coadiuvato da 4 stecche posteriori +2 laterali.
Altezza 27 cm. Aprire la fascia, sganciare i laterali. Posizionare la fascia al centro della zona lombo sacrale, agganciare i due pannelli frontali, successivamente agganciare i tiranti laterali, regolando la tensione sul dorso.

Indicazioni

» Dolori della regione lombare.
» Lomalgie di origine dorsale.
» Dolori reumatici e infiammazioni dell'articolazione ileosacrale, instabilità lombo sacrale, schiena ipermobile, alterazione del portamento.
» Tutti i decorsi post-operatori dove non è necessario l'immobilizzo.

Avvertenze

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio medico.