



CODICE	PRODOTTO
4800400	DISCO GIREVOLE BIG

CLASSIFICAZIONE	
CERTIFICAZIONE	Dispositivo medico provvisto di marcatura CE – Direttiva 93/42CEE – D.Lgs n° 46 del 24.02.97 – Classe I
CND	Y123099
N° REP. DM	1391978
METAPRODOTTO MEPA	Teli e sistemi per trasferimento o posizionamento pazienti
CARATTERISTICHE	
DESCRIZIONE	Disco girevole per la rotazione assistita del paziente.
INDICAZIONI	<p>Il Disco Girevole viene utilizzato nella movimentazione di pazienti parzialmente collaboranti in grado di reggersi in piedi. Risulta utile nelle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Trasferimento letto/carrozzina · Trasferimento carrozzina/wc · Trasferimento poltrona/carrozzina <p>L'operatore può facilmente ruotare il paziente in posizione eretta per farlo poi accomodare sulla carrozzina. Per un maggior aiuto all'operatore ed una maggiore sicurezza per il paziente raccomandiamo l'uso della cintura ergonomica Glide Belt le cui maniglie evitano di dover afferrare il paziente per il pigiama o la vestaglia migliorando così la presa e la sicurezza per il paziente stesso.</p>
MATERIALI	ABS/Teflon
MISURE	41 cm (diametro)
CARATTERISTICHE SPECIFICHE	<ul style="list-style-type: none"> • Spessore molto ridotto (7 mm) che riduce il rischio che operatore o paziente possano inciampare • Peso limitato (0,8 kg) • Movimento rotante bilanciato per una maggiore sicurezza nel trasferimento • Maniglia di presa • Grande robustezza, lunga durata • Facile manutenzione, resistente agli acidi • Rivestimento antiscivolo su entrambi i lati • Carico sino a 200 kg • Bassa reazione al fuoco • Latex free

PULIZIA	Può essere lavato con acqua e sapone. La superficie può venire disinfettata con alcool.
GARANZIA	24 mesi
SMALTIMENTO	I prodotti Samarit sono realizzati con materiali ecologici non nocivi dal punto di vista tossicologico.
PRODUTTORE	SAMARIT MEDICAL AG (SVIZZERA)
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO	SAMARIT MEDITALIA S.R.L. VIA TRIESTE 49/D 35035 MESTRINO (PD) TEL. 049/8979968 FAX 049/8986170 Info @samarit.it - www.samarit.it

UTILIZZO

Seguire le norme di sicurezza previste dal Vostro istituto/Ente.

Confrontare manuale d'uso.