

**Nome Prodotto**CORSETTO WORKSPORT LOMBARE  
CLASSICO  
(cod. 707)

REF	Taglie	Misure Circonferenza Vita (da cm a cm)
707	S	70/80
	M	80/95
	L	95/110
	XL	110/125
	XXL	115/135



Altezza anteriore 14 cm

Altezza posteriore 27 cm

Colore: Nero con rifiniture in blu.

**Destinazione d'Uso**

Per pazienti che devono mantenere la corretta posizione della schiena e anche per prevenire strappi durante uno sforzo fisico. È consigliato l'uso al bisogno.

Il dispositivo medico in oggetto non è adatto per scopi non richiamati dalla presente documentazione, per cui si declina ogni responsabilità per eventuali danni e conseguenze che possono derivare da un uso improprio.

**Descrizione e Materiali**

50% Poliammide, 20% Gomma, 15% Poliuretano e 15% Poliestere. Contiene Lattice.  
Chiusura a strappo con due tiranti regolabili.

**Istruzioni per l'Uso**

Indossare in vita sopra un capo di biancheria intima possibilmente di fibra naturale.

1. Posizionare il corsetto attorno alla vita e chiuderla con il velcro all'altezza dell'ombelico;
2. Afferrare i tiranti elastici laterali e fissarli sul pannello di velcro esterno.

**Controindicazioni e Avvertenze**

Nessuna controindicazione se non segnalata dal medico curante.

Dispositivo Non Sterile. Seguire le istruzioni di lavaggio. Non utilizzare se la confezione è danneggiata.



Contiene lattice.



Dispositivo non sterile.



Il dispositivo medico è monopaziente. Non usare su più pazienti.

**Manutenzione e Pulizia / Lavaggio**

La manutenzione periodica del dispositivo medico consiste nelle operazioni di lavaggio e asciugatura.

Lavare in acqua tiepida massimo a 30°C con detersivo per capi delicati, sciacquare accuratamente ma togliere l'acqua comprimendo il capo dentro un asciugamano di spugna, non strizzare ed asciugare lontano da fonti di calore.

Lasciare asciugare orizzontalmente; non stirare.



Temperatura max 30°C



Non candeggiare

Non asciugare in  
asciugatrice

Non stirare



Non lavare a secco

#### Conservazione



Al fine di evitare contaminazioni il dispositivo andrebbe conservato in un luogo pulito, asciutto (per evitare lo sviluppo di muffe), al riparo da fonti di luce diretta e calore, protetto da un involucro. Il mantenimento della sua integrità fisica (assenza di fori, tagli, sfilacciature, scuciture, usura, muffa ecc.) determina la durata di vita del dispositivo.

#### Tipo di Confezione

Confezionato in scatola di cartone.

#### Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata che deve essere effettuata in conformità alle normative nazionali e locali in vigore. Verificare le disposizioni del proprio Comune.

Raccolta Differenziata:

Scatola di Cartone → Raccolta Carta

Sacchetto di Plastica → Raccolta Plastica

Scheda Tecnica Informativa → Raccolta Carta

Corsetto → Raccolta Indifferenziata

#### Garanzia

Il presidio è garantito a norma di legge. Per i difetti di fabbricazione, sono escluse le parti di consumo.

#### Altre Informazioni

Codice CND: Y060308

Codice EMDN: Y060308

Codice BD/RDM: 149209



Dispositivo Medico di Classe I  
Regolamento (UE) 2017/745



Albo Land srl

Via Mastroianni, 9 - 40013 Castel Maggiore (Bologna) - Italy

Tel: +39 051 373838 Fax: +39 051 19875902 - [www.alboland.com](http://www.alboland.com) / [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it)

In caso di incidente grave informare tempestivamente l'Autorità Competente dello Stato Membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito oltre al fabbricante Albo Land srl ai seguenti recapiti:

e-mail: [info@alboland.it](mailto:info@alboland.it) - Tel.: +39 051 373838 / Fax: +39 051 19875902