



**DOCCIA MOBILE PIEGHEVOLE MINORCA
SEDIA**


Manuale di istruzioni

DISPOSITIVO MEDICO

RIF. 822012



SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI

| | | | |
|---|--------------------------------|---|--|
|  | Indirizzo del produttore |  | Invito alla consultazione del manuale utente |
|  | Data di produzione |  | Seguire le istruzioni di sicurezza |
|  | Numero di lotto |  | Conformità CE |
|  | Riferimento al prodotto |  | Dispositivo medico |
|  | Peso massimo dell'utilizzatore | | |

MANUALE DI ISTRUZIONI

IT

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.

Consultare il proprio medico o operatore sanitario prima di utilizzare qualsiasi dispositivo di assistenza. Lui/lei ti consiglierà e ti informerà sull'uso più appropriato al tuo caso.

Distributore: questo manuale di istruzioni deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

La sedia da doccia mobile pieghevole Minorca è un dispositivo medico. È un ausilio tecnico per la toilette per anziani, persone con mobilità ridotta, disabili, feriti o che perdono facilmente l'equilibrio.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Materiale consegnato nella scatola:

- ÿ Cornice
- ÿ Cuscino dello schienale
- ÿ Cuscino del sedile
- ÿ Poggiapiedi
- ÿ Ruote posteriori 12 pollici (x2)
- ÿ Ruote anteriori con freno 4 pollici (x2)
- ÿ Secchio + Coperchio
- ÿ Manopole (x2)
- ÿ Clip (x2)

MISURE DI SICUREZZA



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Non superare il peso massimo supportato di 125 kg. • Controllare che tutti i componenti siano fissati prima dell'uso
- Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni. • Controllare visivamente il prodotto
- Prima di ogni utilizzo del prodotto, controllare i freni e le ruote.
- Controllare la stabilità della sedia prima dell'uso. • Utilizzare solo su terreno pianeggiante.
- Quando si è fermi, azionare i freni sulle ruote. • Assicurarsi che i freni siano rilasciati prima di spostare nuovamente la sedia.
- Assicurarsi sempre che il dispositivo sia fermo e che i freni siano applicati durante il trasferimento da e verso il dispositivo.
- Non sporgersi dall'apparecchio.
- Controllare le ruote portanti i freni
 - In caso di parti danneggiate, rotte, usurate o mancanti, contattare il rivenditore.

MONTAGGIO E UTILIZZO

- Disimballare attentamente ed esaminare il prodotto per assicurarsi che sia completo.
- Prima dell'uso, controllare eventuali segni di danno, come saldature incrinate, vernice scrostata, sedile incrinato o danneggiato o piegato tubo. Se noti uno di questi problemi, contattaci e astieniti dall'utilizzare il prodotto.

INSTALLAZIONE :



Aprire il telaio, installare le ruote posteriori come in foto



Le ruote posteriori sono installate.



Regolare la manopola per fissare la ruota posteriore al telaio.



Aprire il telaio principale quando le ruote posteriori sono installate correttamente, inserire la clip su entrambi i lati della sedia, come mostrato nella foto sopra. Posizionare il poggiatesta sul foro metallico del telaio, come mostrato in figura.



Metti il dado e stringilo con la chiave a brugola.



Metti il secchio sul telaio del secchio e fissa il pannello del sedile alla barra del livello dello schienale. L'installazione è terminata come mostrato nell'immagine.

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e manutenzione del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Pulire regolarmente a mano il prodotto (tutte le ruote, i sedili e gli elementi di fissaggio) con un panno umido e un detergente delicato disinfettante. Non utilizzare prodotti abrasivi, detersivi o prodotti a base di solventi.
- Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto.
- La sedia deve essere completamente revisionata ogni anno, con lubrificazione obbligatoria.
- Si consiglia di sottoporre il dispositivo a manutenzione una volta all'anno.
- In caso di malfunzionamento, non riparare da soli il prodotto. Consultare un rivenditore autorizzato.
- Lista di controllo:

Per garantire una durata ottimale del prodotto, controllare prima di ogni utilizzo e verificare quanto segue:

| Tipo di controllo | Metodo | Frequenza |
|--|------------------------------|------------------------|
| Controllo del sedile e dello schienale | Regolazione/controllo visivo | Prima di ogni utilizzo |
| Controllo dei fissaggi | Regolazione | Una volta al mese |
| Controllo delle ruote | Regolazione | Una volta al mese |
| Controllo dei freni | Regolazione | Prima di ogni utilizzo |

CAMBIO DI PROPRIETA'

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando trasferisci il tuo prodotto, ricordati di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se desideri effettuare il riciclaggio per conto tuo, chiedi alla tua società locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di lesioni gravi.

- Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino un termosifone) o vicino ad una fonte fredda.
- Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.
- Rispettare le condizioni di conservazione del prodotto:
 - In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo prodotto da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salmastra).
 - Conservare insieme tutte le parti rimosse nello stesso posto (o individuarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non incastrare nulla...).

PERIODO DI UTILIZZO

L'aspettativa di vita di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione per un utente. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

Se il dispositivo viene utilizzato in un ambiente multiutente (come una casa di cura o un ospedale), la durata potrebbe ridursi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------|--|
| Dimensioni complessive | Larghezza 61 x profondità 75 (93,5 con poggiatesta ripiegato) x altezza 95 cm. |
| Dimensioni del sedile | Larghezza 43 x profondità 43 x altezza 52 cm |
| Larghezza tra i braccioli | 49cm |
| Peso | 9,9 chilogrammi |
| Peso massimo utente | 125 chilogrammi |

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione, progettazione o produzione. Contatta il distributore da cui hai acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto per applicare la garanzia.