

SEDIA A ROTELLE ZERO METAL










Manuale di istruzioni

DISPOSITIVO MEDICO

RIF. 825034



SIMBOLO CHE APPARE SULL'ETICHETTA O SUL MANUALE DI ISTRUZIONI

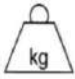	Indirizzo del produttore		Invito alla consultazione del manuale utente
	Data di fabbricazione		Seguire le istruzioni di sicurezza
	Numero di lotto		Conformità CE
	Riferimento al prodotto		Dispositivo medico
	Peso massimo dell'utilizzatore		

MANUALE DI ISTRUZIONI

IT

IMPORTANTE

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e conservarle se necessario.

Utente: se non si è in grado di leggere o comprendere eventuali avvertenze, precauzioni o istruzioni, contattare il proprio operatore sanitario o il distributore prima di utilizzare questo prodotto per evitare rischi e danni.

Consultare il proprio medico o operatore sanitario prima di utilizzare un ausilio per la deambulazione. Lui/lei ti consiglierà l'uso più appropriato per te.

Distributore: questo foglio illustrativo deve essere consegnato agli utilizzatori di questo prodotto.

DESTINAZIONE DEL PRODOTTO

Le sedie a rotelle Zero in metallo sono ausili per la deambulazione per persone con mobilità ridotta. Questi prodotti sono destinati all'uso interno ed esterno. Il design consente un utilizzo a lungo termine sotto la doccia, in acqua, comprese piscine e spa. Senza alcun magnetismo, può essere utilizzato in una sala MRI. Può essere utilizzato anche nei checkpoint di sicurezza aeroportuali e nelle aziende di sicurezza. Ha tutte le caratteristiche di una sedia normale, compresi braccioli e poggiatesta rimovibili.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



- 1 ruota posteriore
- 2 Asse della ruota posteriore
- 3 Freno (entrambi i lati)
- 4 Rullo guida con copertura
- 5 Rullo di scorrimento
- 6 Ruote anteriori piroettanti
- 7 Maniglie
- 8 Schienale
- 9 Bracciolo
- 10 posti
- 11 Traversa del telaio
- 12 Poggiatesta rimovibile
- 13 Barra di spinta

MISURE DI SICUREZZA



La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare il rischio di lesioni gravi.

Non superare il peso massimo supportato di 100 kg.

Assicurarsi che tutte le parti siano sicure e in buone condizioni.

Non utilizzare il prodotto su scale o scale mobili.

Utilizzare solo accessori e parti forniti dal produttore.

Controllare che i freni funzionino correttamente prima dell'uso.

Questa sedia a rotelle è stata progettata per l'uso interno in veicoli di qualsiasi tipo. Trasferire sempre l'utilizzatore della sedia a rotelle su un sedile approvato dal produttore del veicolo e utilizzare tutte le cinture di sicurezza disponibili.

Non utilizzare questa sedia a rotelle su strade, vie o altro traffico superficiale.

Assicurarsi di attivare completamente i freni delle ruote quando si sale e si scende dalla sedia a rotelle o quando si viaggia in un ascensore o in un montacarichi per sedia a rotelle. La sedia a rotelle deve trovarsi su una superficie piana, stabile e livellata.

Quando si sale o si scende dalla sedia a rotelle, non salire o caricare il peso sul piede. Quando provi ad estendere le braccia sulla schiena, fallo solo fino a quando il braccio può essere esteso senza cambiare la posizione seduta.

Non stare in piedi sulla sedia a rotelle. Se

è necessario appoggiarsi o appoggiarsi alla sedia a rotelle, assicurarsi che le ruote anteriori siano rivolte in avanti, in modo che la base della ruota sia estesa, per stabilizzare la sedia a rotelle.

Richiedere una consulenza professionale quando si salgono o scendono pendenze superiori a 10 cm. Se dovete fermarvi in pendenza, evitate movimenti bruschi e rapidi durante lo spostamento. Il movimento può causare instabilità a causa dell'angolazione della sedia. L'uso dei freni può provocare frenate accidentali, movimenti incontrollati o stalli improvvisi. Cercare di non cambiare direzione su una rampa, poiché ciò potrebbe causare instabilità e la sedia potrebbe ribaltarsi.

Durante l'uso, bloccare i freni per tutte le azioni.

Tutte le ruote devono essere sempre a contatto con il suolo.

Quando il prodotto è in posizione stazionaria, i freni devono essere bloccati. Non tentare di spostare il prodotto se i freni sono bloccati.

Assicurarsi che i poggiapiedi siano agganciati.

Assicurarsi che l'asse di smontaggio sia saldamente agganciato alle ruote posteriori e al telaio della sedia a rotelle.

Fare attenzione quando si sale sui cordoli o quando si utilizzano superfici in pendenza, irregolari o scivolose. In caso contrario, si potrebbe verificare un rischio significativo di cadute o lesioni.

Non utilizzare il prodotto su pendii bagnati, ghiacciati o innevati.

Essere consapevoli del rischio di pizzicamento durante l'utilizzo del prodotto.

Se qualche parte è danneggiata, rotta, usurata o mancante, contattare il rivenditore.


MONTAGGIO E UTILIZZO

È importante leggere e comprendere queste istruzioni di montaggio prima di montare la sedia a rotelle. Prima di utilizzare la carrozzina è necessario effettuare i seguenti passaggi.

Nota: ti serviranno solo le 2 chiavi speciali presenti nel kit di montaggio.

Azionare il freno dalla posizione 1 alla posizione 3: sbloccare i 2 freni laterali dalla posizione verticale alla posizione avanzata.

Il freno della ruota è bloccato quando la sedia a rotelle è imballata nella scatola. Quando si inizia il montaggio è necessario sbloccarlo, altrimenti la ruota non verrà montata correttamente.

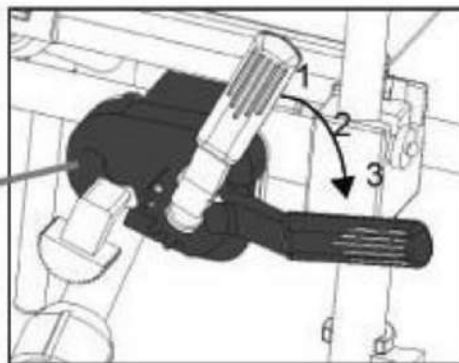

ELENCO PARTI

a) Parti della sedia

①



Ruota posteriore x 2

②



Poggiapiedi sinistro x 1

③



Poggiapiedi destro x 1

④



Rullo anteriore x 2

⑤



Telaio principale x 1

Braccioli x 2

⑥



Schienale x 1


Maniglia x 2

⑦



Barra di spinta x1

b) Strumenti

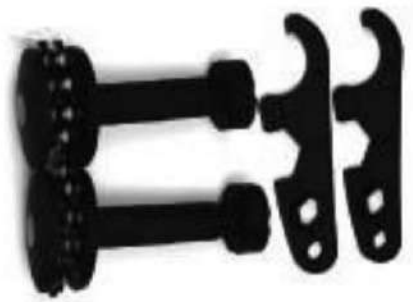

Asse della ruota posteriore x 2

Chiave x 2

Cuscinetto anteriore x 2

c) Kit di riparazione




Cuscinetto posteriore x 1

Maniglia del freno x 1

Copertura antipolvere x

Installazione delle parti della ruota posteriore. Installare prima il cuscinetto dell'asse in posizione.

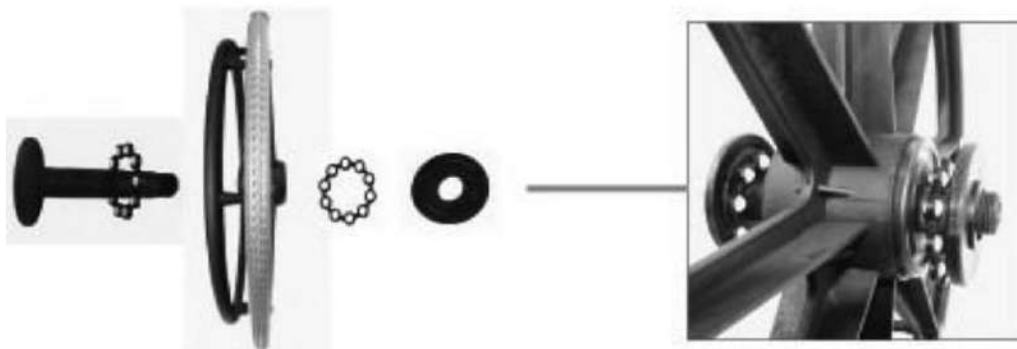

Inserire il kit ruota posteriore nel foro N°2 vedere sotto.

Ci sono 2 fori sul telaio posteriore, assicurati di inserire la ruota posteriore nel foro 2.



- Se installi il kit ruota posteriore nel foro 1, il freno non funzionerà e la ruota posteriore non potrà essere montata correttamente.
- Se il freno non funziona, controlla questo passaggio.

Installare la maniglia in plastica sulla ruota posteriore e utilizzare la chiave speciale per serrare l'asse.



Maniglia della ruota



Chiave di serraggio



* Ruotare la sedia a rotelle dopo installazione delle 4 ruote

Installare i poggiatesta. Controllare l'orientamento rispetto all'illustrazione. Rilasciare il blocco per consentire la regolazione dei poggiatesta. Bloccare la serratura quando i poggiatesta sono in posizione.



* Sono disponibili 4 livelli di regolazione per i poggiatesta.

Installare lo schienale. Inserire le maniglie. Assicurarsi che lo schienale sia inserito correttamente nel telaio e bloccarlo. Quindi inserire la barra di spinta e bloccarla.



* Sollevare la serratura per montare lo schienale.
Abbassare la serratura per fissare lo schienale.



Inserire la barra di spinta
* La barra di spinta è dotata di 2 anelli di fissaggio. Ruotarli per l'attacco sinistro e destro

Controllare il fissaggio di tutti i componenti per un montaggio corretto e sicuro.


Controllare il fissaggio dei braccioli, il fissaggio dei poggiatesta, il fissaggio delle maniglie e il fissaggio della barra di spinta.

Verificare che i 2 freni laterali possano essere utilizzati correttamente.

Se sono presenti una cintura di sicurezza e un supporto per le gambe, usali.


Per piegare e aprire la sedia

1. Sollevare i poggiatesta in posizione verticale.
2. La barra di spinta deve essere abbassata o rimossa.
3. Afferrare il rivestimento del sedile con entrambe le mani al centro e sollevarlo.
4. Metti la mano sopra la barra del sedile. Premere la barra finché la sedia a rotelle non è completamente aperta e pronta per sedersi.

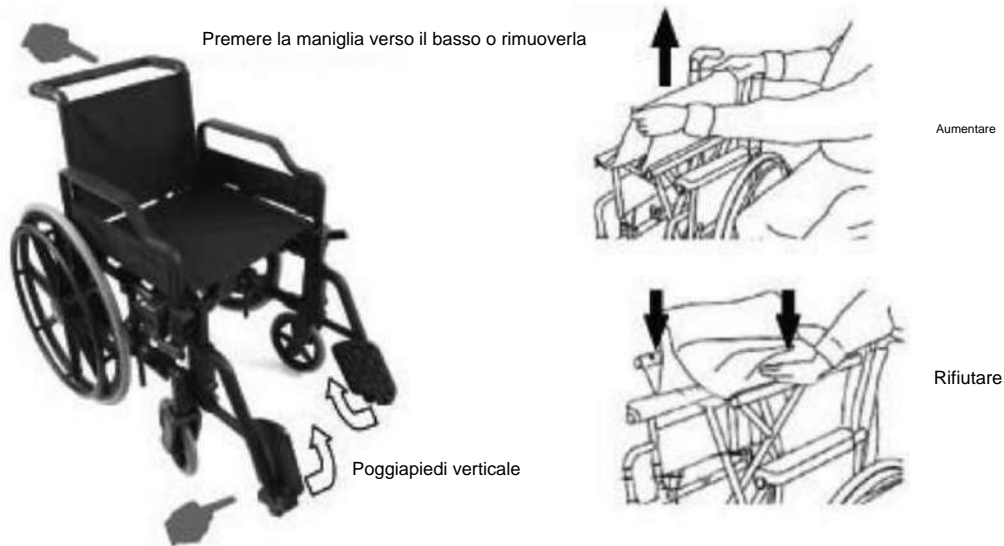

Serratura


1. Braccioli, poggiapiedi, maniglie dello schienale e barra di spinta hanno tutti la stessa serratura.
2. Sollevare la serratura, inserire correttamente braccioli, poggiapiedi, schienale, barra di spinta. Assicuratevi che siano completamente inseriti.
3. Abbassare tutti i blocchi per utilizzare la sedia in sicurezza. Controllare prima di utilizzare la sedia.

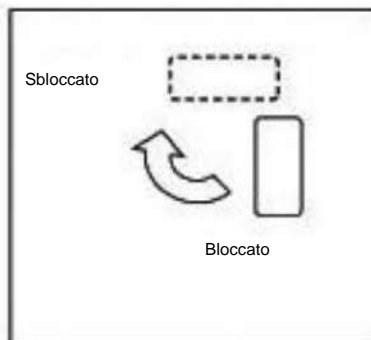

Freno della ruota posteriore

1. Posizionare la sedia su una superficie piana per eseguire questa procedura.
2. Sono disponibili 3 posizioni del freno: sbloccato, rallentatore, bloccato/arrestato.
3. Posizione 1, sbloccata (posizione orizzontale), la ruota posteriore può girare liberamente. Posizione 2, posizione lenta (posizione della maniglia intermedia).

Posizione 3, premere per bloccare e parcheggiare la sedia a rotelle, la leva del freno deve essere nella posizione finale.

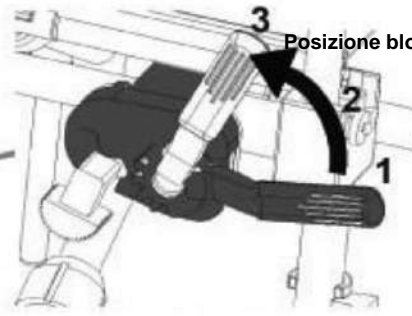

Posizione bloccata

1. Posizione sbloccata

Premi per bloccare e fermare

* Non tentare di sedersi o stare in piedi

alzarsi dalla sedia fino a quando i freni non sono bloccati saldamente.

Regolazione del poggiatesta

1. I poggiatesta sono rimovibili e regolabili. Sono disponibili 4 posizioni di altezza del poggiatesta, consentendo di scegliere posizioni diverse per usi diversi.
2. Le posizioni da 1 a 4 determinano l'altezza dei poggiatesta, dal più alto al più basso.
3. Per selezionare il livello del poggiatesta, l'utente deve aprire la serratura e quindi bloccarla.



Commutazione

Attenzione: non tentare di afferrare e/o sollevare oggetti distanti.
Non sporgersi in avanti poiché la sedia potrebbe ribaltarsi.

Assicurarsi che le ruote o le rotelle piroettanti siano sempre nella direzione di marcia. Stare il più vicino possibile agli oggetti da raccogliere e azionare i freni.



Supporto posteriore

Attenzione: non cercare di intrappolare oggetti dietro di voi. La sedia a rotelle potrebbe ribaltarsi.

Avvicinarsi il più possibile all'oggetto con la sedia a rotelle, senza cambiare posizione seduta. Spostare le ruote anteriori in avanti in modo che i 2 assi delle ruote siano quanto più distanti possibile. Inclinarsi all'indietro quanto lo consente la lunghezza del braccio senza modificare la posizione seduta.



Posizionare e inclinare all'indietro


Entrambi i freni devono essere bloccati per salire o scendere dalla sedia a rotelle.

Aprire la struttura principale con le mani, premendo sulle 2 guide laterali del sedile (non cercare di aprire o separare i 2 braccioli, non resisteranno e si romperanno).


Guide del sedile



Installare le ruote piroettanti nella parte anteriore. Ruotare il telaio principale per facilitare il montaggio delle ruote. Montare i 2 cuscinetti anteriori, la forcella attraverso il tubo e utilizzare la chiave per serrare le ruote.

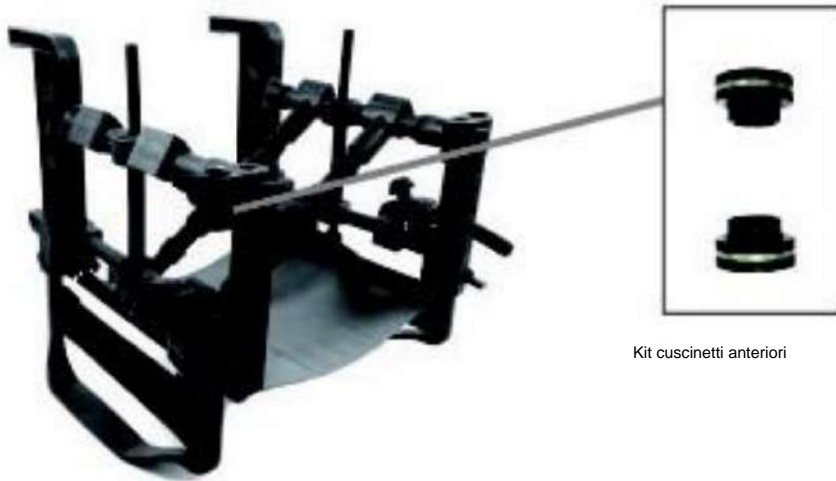

Kit cuscinetti anteriori

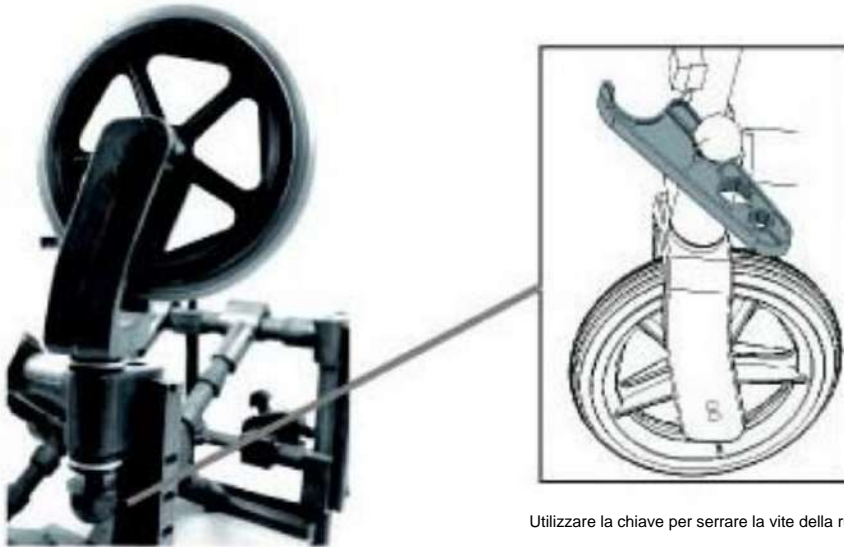

Utilizzare la chiave per serrare le viti della ruota orientabile

CURA E MANUTENZIONE



La mancata cura e monitoraggio del prodotto può comportare il rischio di lesioni gravi.

- Pulire regolarmente il prodotto con acqua tiepida e un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi, detersivi o solventi. • Asciugare con un panno morbido, pulito e asciutto. • Assicurarsi che non vi siano accumuli di sporco o detriti intorno all'asse, ai freni o alle ruote. • Non utilizzare prodotti per la pulizia contenenti fenolo o cloro, poiché potrebbero danneggiare i materiali in alluminio e poliammide.
- Lubrificare le ruote con un po' d'olio se cigolano. • Controllare periodicamente l'usura e la resistenza di tutte le viti e bulloni. Sostituire eventuali parti rotte, danneggiate o usurate immediatamente.
- Controllare che i freni funzionino prima di ogni utilizzo.
- Controllare i freni di stazionamento spingendo le maniglie in posizione bloccata e quindi tentando di spingere il prodotto.
- Controllare l'imbottitura per eventuali tagli, strappi o uso intenso. Sostituire se necessario.
- In caso di malfunzionamento, non riparare il prodotto da soli. Consultare un rivenditore autorizzato. • Gli pneumatici in gomma per carichi pesanti richiedono una manutenzione limitata ma richiedono una pulizia regolare con un panno morbido.
- I pneumatici in gomma per carichi pesanti devono essere sostituiti se sono incrinati o strappati.
- Lista di controllo:

Per mantenere il prodotto in buone condizioni, controllare prima di ogni utilizzo e controllare regolarmente come segue:

Controlla il prodotto	In qualsiasi momento	Ogni settimana	Ogni mese
Viti e elementi di fissaggio		X	
Stabilità del telaio e dello schienale			X
Condizioni del sedile e delle ruote		X	
Funzionamento dei freni	X		

CAMBIO DI PROPRIETA'

Il prodotto può essere riutilizzato. Deve essere prima pulito e disinfettato secondo le istruzioni igieniche. Quando trasferisci il deambulatore, ricordati di consegnare tutta la documentazione tecnica necessaria al nuovo utente. Il prodotto deve essere preventivamente ispezionato da uno specialista autorizzato.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Quando il prodotto è diventato inutilizzabile ed è necessario smaltirlo: rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Se desideri effettuare il riciclaggio per conto tuo, chiedi alla tua società locale di gestione dei rifiuti le linee guida per lo smaltimento.

MAGAZZINAGGIO



La mancata osservanza delle condizioni di conservazione può comportare il deterioramento del prodotto e quindi il rischio di lesioni gravi.

Non conservare il prodotto per un lungo periodo di tempo vicino a una fonte di calore o al sole (ad esempio dietro una finestra o vicino a un termosifone) o vicino a una fonte fredda.

Tenere lontano da fiamme e fonti di scintille.

Rispettare le condizioni per la conservazione e lo stoccaggio del prodotto.

- In un luogo asciutto e temperato
- Proteggi il tuo prodotto imballandolo da polvere, corrosione (es. elementi abrasivi, sabbia, acqua di mare, aria salmastra).
- Conservare insieme tutte le parti rimosse nello stesso luogo (o localizzarle se necessario) per evitare di mescolarle con altri prodotti durante il rimontaggio.
- Tutti i componenti devono essere immagazzinati senza alcun carico (non appoggiare oggetti troppo pesanti sugli elementi del prodotto, non inceppare nulla...).

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni complessive	Larghezza 65 x altezza 87 x profondità 109 cm
Dimensioni del sedile	Larghezza 45 x altezza 52 x profondità 40 cm
Larghezza piegata: 36 cm	
Dimensioni della ruota anteriore	20cm
Dimensioni della ruota posteriore	59cm
Peso	18 chilogrammi
Peso massimo supportato	100 chilogrammi

Dispositivo MR SAFE



PERIODO DI

La durata prevista di questo prodotto è di 5 anni in normali condizioni di utilizzo, sicurezza e manutenzione. Oltre questo periodo il prodotto può essere utilizzato finché è ancora in buone condizioni.

GARANZIA

Questo prodotto è garantito per due anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. IDENTITIES fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di un difetto di fabbricazione, progettazione o materiale. Contatta il distributore da cui hai acquistato il prodotto nel caso in cui sia necessario presentare un reclamo. I guasti derivanti da danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Contatta il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto per applicare la garanzia.

Esclusione di garanzia -

Piastre poggiapiedi (parti soggette ad usura non garantite).

- Pneumatici (parti soggette ad usura non garantite).
- Parti danneggiate a causa di un incidente
- Danni dovuti a uso, manutenzione e/o conservazione impropri