

5. MANUTENZIONE

Gli interventi devono sempre essere eseguiti da personale adeguatamente istruito.

5.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Ogni 6 mesi verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio (robustezza meccanica, serraggio delle viti, pulizia, ecc.).
2. Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" (es: urto, versamento di liquidi, ecc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.

5.2 PULIZIA

Per la pulizia utilizzare un panno inumidito in acqua e detergente non aggressivo.

Avvertenze:

- Non usare disinfettanti alcolici sulla similpelle del lettino.
- Eseguire una pulizia accurata della similpelle dopo ogni utilizzo.

5.3 RICHIESTA ASSISTENZA

La CHINESPORT dispone di un servizio telefonico per l'assistenza tecnica.

In caso di necessità contattare lo **0432/522315**.

In orario diverso da quello commerciale è possibile comunicare a mezzo fax n° 0432-521792.

6 GARANZIA

I nostri lettini sono coperti da garanzia per il periodo di 36 mesi per le parti meccaniche a partire dalla data registrata sul documento di spedizione.

Durante tale periodo la CHINESPORT si impegna alla sostituzione o alla riparazione gratuita di quelle parti che dovessero essere difettose per fabbricazione.

Non sono compresi: danni causati da trasporto e/o movimentazione, guasti e/o rotture imputabili ad un errato uso dell'apparecchiatura. La garanzia non si applica per la sostituzione di parti di consumo.

Le riparazioni sono eseguite presso i nostri rivenditori autorizzati e/o nella nostra sede alla quale, pertanto, dovranno essere recapitati gli eventuali resi con spese di trasporto a carico del cliente.

Per ogni controversia l'unico foro competente è quello di UDINE.


Per rendere operante la garanzia, ed in ogni caso per reclami o assistenza di natura tecnica, contattare direttamente il nostro Responsabile Assistenza Tecnica.

7 SPECIFICHE TECNICHE E CONFORMITÀ

7.1 SCHEDA TECNICA

Denominazione articolo	ALFATRAC	art. 05.4.09324
Dimensioni	vedi disegno	
Peso Kg	Kg 75	
Peso massimo ammissibile	Kg 135	
Carico massimo di trazione applicabile	Kg 90	

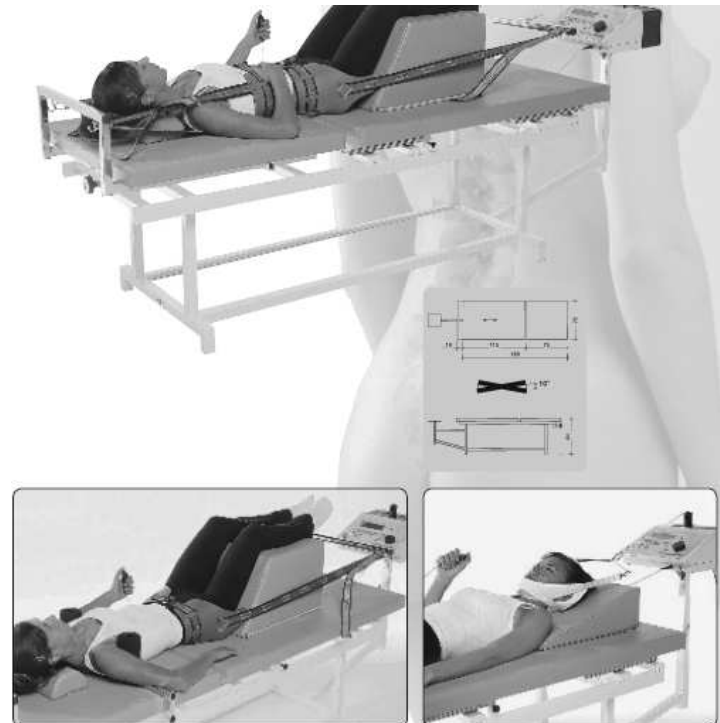
7.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Denominazione prodotto	ALFATRAC
Codice articolo	05.4.09324
Tipo di prodotto	lettino accessorio per trazione
Classe di appartenenza (art. 8 del D.Lgs. n.46 del 24/03/1997)	I
L' apparecchiatura è conforme alla direttiva CEE 93-42.	
CHINESPORT S.p.A. (Rapp. Legale) 	

ALFATRAC

LIBRETTO D'ISTRUZIONI

09324

ALFATRAC
LETTINO ACCESSORIO PER TRAZIONI

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 COSTRUTTORE

CHINESPORT S.p.A. - Via Croazia n°2 33100 UDINE – ITALIA - TEL. 0432 621621 FAX 0432 621620

2. DESCRIZIONE DELL' APPARECCHIATURA

2.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

ALFATRAC è un lettino accessorio che consente di effettuare trazioni terapeutiche in quanto adatto all'utilizzo con la unità di trazione elettronica TRU-TRAC art. 05.3.09335.

E' corredato da un set di ancoraggi per effettuare i vari tipi di trazione.

L' appoggiaschiena può essere posizionato obliquamente per consentire una rotazione del tronco, mentre il piano d' appoggio del bacino corre su guide eliminando l' attrito corporeo in fase di trazione.

La struttura è costituita da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e le parti scorrevoli in acciaio cromato.

2.2 CONDIZIONI AMBIENTALI

L'apparecchiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all'interno di un edificio con temperatura ammesse da 5° a 40°C e con umidità compresa tra 10% e 80%.

In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali

- umidità relativa:	10%	-	90 %
- temperatura:	-10 °C	-	50 °C

3. SICUREZZA

3.1 AVVERTENZE GENERALI

L' utente deve leggere con attenzione le informazioni riportate nel presente Manuale, in particolare le precauzioni per la sicurezza elencate in questo capitolo: l'apparecchiatura è stata concepita e costruita esclusivamente per eseguire le funzioni descritte su questo Libretto istruzioni.

3.2 LIMITAZIONI D'USO E CONTROINDICAZIONI:

L'apparecchiatura non deve essere utilizzata:

- In presenza di alte temperature o fiamme libere.
- Esposta alle intemperie.
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- Quando collegato ad una unità di trazione elettromeccanica: non utilizzare senza prescrizione del medico e senza controllo del terapista.
- Non utilizzare in soggetti con malformazioni strutturali derivate da tumori o infezioni - pazienti con debolezza vascolare od in condizioni in cui sia controindicato il movimento quali distorsioni, strappi ed infiammazioni - gravidanza, osteoporosi, ernia e claustrofobia - occlusione dentale anormale, emorragie intracapsulari ed ematomi nell' articolazione temporomandibolare
- Quando collegato ad una unità di trazione elettromeccanica: Può provocare una riacutizzazione transitoria di dolori cervicali e lombosciatici e/o disagio alle articolazioni temporomandibolari

3.3 AVVERTENZE PARTICOLARI

- **Attenzione al pericolo di schiacciamento tra il settore scorrevole e lo schienale.**
- **Il lettino non è antistatico.**
- **La similpelle di rivestimento non resiste a temperature superiori a 50°C.**
- **Trasportare in più persone afferrandolo nella struttura metallica.**

Numero telefonico diretto servizio assistenza

(+39) 0432 621699.

Oppure inviare un fax al n°. (+39) 0432-621698 o un e-mail (vedi www.chinesport.it).

4. MESSA IN FUNZIONE

4.1. PRINCIPALI COMPONENTI E DOTAZIONI

Consultare il disegno

Dotazione (vedere pag. 7 allegato libretto istruzioni) :

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
05.5.09430	cuscino trapezio per gambe 40x 50x 30h
05.5.09440	cuscino triangolo cervicale 45x 42x 15h
05.5.09450	cuscino semicilindro cerv. 30x 15x 8h
05.5.09400	mentoniera cuoio con bilancino
05.5.09420	mentoniera tela con bilancino
05.5.09370	cintura toracica media
05.5.09350	cintura pelvica media
05.5.09380	cintura toracica grande
05.5.09360	cintura pelvica grande
05.5.09390	cavigliere per trazione

4.2 PREDISPOSIZIONE

Eseguire le 9 operazioni nel seguente ordine:

1. Estrarre l'apparecchiatura e le dotazioni dall'imballo e trasferirle nel luogo d'uso
2. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia in situazione di buona stabilità
3. Applicare al lettino il sostegno per la testata di trazione e serrare le viti con l' apposita chiave fornita a corredo.
4. Applicare al sostegno il supporto trazione cromato e ad esso l'UNITA DI TRAZIONE TRU-TRAC (art.05.3.09335 fornito solo su richiesta):
 - applicare la testata direttamente al supporto cromato facendo combaciare la spina del supporto con l' apposito foro sul fondo della testata
 - bloccare la testata serrando la vite svasata (fornita a corredo con l' unità di trazione) con l' apposita chiave.
5. Regolare l' altezza desiderata della testata serrando l' apposito volantino nella tacca di riferimento.
6. Applicare al lettino gli eventuali ausili di trazione (sottascellari, supporto per ancoraggio cinghie).
7. Regolare l' inclinazione dello schienale agendo sull' apposita manopola.
8. Prima di iniziare le trazioni, sbloccare il settore scorrevole sfilando il perno di blocco.
9. Per applicare le imbragature ed eseguire le trazioni consultare l' allegato al libretto istruzioni " TRAZIONI VERTEBRALI" di H. Duane Saunders, M.S. , P.T.

Avvertenze:

- **Non eseguire modifiche alle regolazioni con il paziente sotto il carico di trattamento.**

