


**COMPONENTI ELETTRICHE DELLE POLTRONE IN BASE ALLA
TIPOLOGIA DEL MECCANISMO MONTATO.**

POLTRONE ELETTRICHE ALZAPERSONA CON 4 MOTORI:

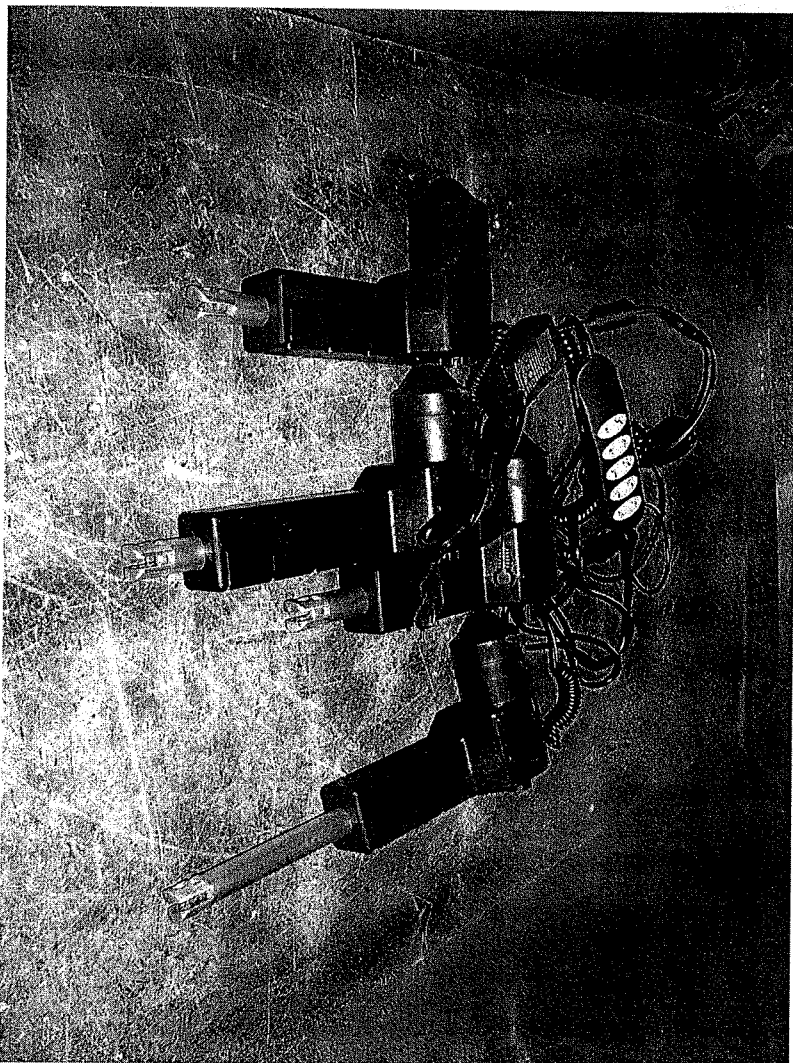

**MANUALE D'UTILIZZO E MANUTENZIONE POLTRONE
RELAX ELEVABILI**

MANUTENZIONE DELLE POLTRONE

Le nostre poltrone relax sono costruite con materiali di prima qualità così da poter funzionare nel tempo senza creare problematiche di alcun genere al cliente.

Malgrado ciò chiediamo al cliente di effettuare saltuariamente alcune operazioni di controllo sulle poltrone per garantirne il perfetto funzionamento.

Verificare semestralmente che le viti di fissaggio del movimento in ferro al fusto in legno siano strette, che le viti di assemblaggio del meccanismo siano strette, in quanto la continua movimentazione delle poltrone può causare un allentamento delle stesse.

In presenza di rumori o attriti nel meccanismo usare il prodotto WD 40 o prodotti similari per lubrificarne le parti in movimento. Tali prodotti sono acquistabili nelle ferramenta o sono richiedibili presso la nostra azienda.

Specifiche per le poltrone elettriche

Specificatamente alle poltrone elettriche fare attenzione che il cavo di alimentazione delle poltrone e il cavo del telecomando rimangano posizionati nelle modalità stabilite dalla ditta costruttrice per evitare il taglio degli stessi.

Mantenere i motori elettrici puliti da polvere o altro.

Accertarsi dell'integrità dei dispositivi elettromeccanici.

Non aprire e non cercare di riparare i motori, i trasformatori e i telecomandi, solamente il personale specializzato può riparare le poltrone.

In caso la poltrona da Voi acquistata si fermi, verificare quanto segue:

- n.1 che la presa di corrente alla quale la poltrone è collegata sia alimentata;
- n.2 che la spia del trasformatore sia accesa e che il trasformatore sia caldo;
- n.3 che i cavi di alimentazione e i cavi dei telecomandi siano correttamente collegati.

Fatte le verifiche sopra citate se la poltrona continua a non funzionare prima di chiamare il Vostro rivenditore per l'assistenza controllare:

n.1 che il cavo dell'alimentazione che va dal trasformatore alla poltrona non sia tagliato;

n.2 che i cavi dei motori collegati al telecomando non siano tagliati;

n.3 che il telecomando non abbia subito urti e sia ancora integro;

n.4 che i motori siano integri nelle loro parti, (soprattutto verificare che il teflon bianco del motore di sollevamento non sia spaccato).

Questi dati servono al centro assistenza per sveltire le tempistiche di risoluzione dei problemi della poltrona.

COMPLIMENTI! Avete acquistato un prodotto di qualità elevata progettato e costruito per esservi d'aiuto per lungo tempo purché utilizzato e mantenuto secondo le istruzioni riportate in questo manuale.

CONSERVARE ACCURATAMENTE QUESTO LIBRETTO. ESSO SERVE DA MANUALE D'ISTRUZIONI E DESCRIVE LE NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE DELLE NOSTRE POLTRONE RELAX CON MOVIMENTO ELETTRICO INTEGRATO DI ALZAPERSONA.

E' MOLTO IMPORTANTE CHE IL LIBRETTO D'ISTRUZIONI SIA LETTO PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE LE POLTRONE RELAX PER FAR SI CHE NON SI VERIFICHINO DANNI A COSE E PERSONE CONSEGUENTI A ERRORI NELL'INSTALLAZIONE DELLE POLTRONE, DA INTERVENTI DI PERSONALE NON AUTORIZZATO O DA UTILIZZO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NEL LIBRETTO STESSO.

POTREBBERO ESSERE RISCOstrate DELLE VARIAZIONI TECNICHE SULLE POLTRONE RELAX, INTRODOLTE SENZA PREAVVISO, NELLO SFORZO CONTINUO DI MIGLIORARLE ULTERJORMENTE.

CE

TUTTI I MOTORI E LE COMPONENTI ELETTRICHE DELLE NOSTRE POLTRONE RELAX SODDISFANO LE DIRETTIVE DI SICUREZZA PER QUANTO RIGUARDA LA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMV) E I LIMITI DI VOLTAGGIO STABILITI DALLA DIRETTIVA

2004/108/EC

**SPAZIO DA COMPILARE A CURA DEL RIVENDITORE PER
L'ATTIVAZIONE DEL PERIODO DI GARANZIA:**

AVVERTENZE GENERALI

Posizionare la poltrona su un piano orizzontale.

Non permettere ai bambini di giocare su questo prodotto o di azionare il meccanismo in quanto i leveraggi del movimento delle poltrone possono nella loro normale movimentazione ferire i bambini stessi.

I bambini possono utilizzare le poltrone ma solo in presenza di persone adulte.

Nell'azionare la poltrona con il telecomando, fare molta attenzione che persone ed animali non rimangano feriti o cose non siano danneggiate dalle parti in movimento del meccanismo sotto la poltrona.

Solamente l'occupante dovrebbe operare sul meccanismo.

Non posizionare a ridosso di pareti o oggetti le poltrone relax in quanto nella loro movimentazione necessitano di spazio; eventuali ostacoli possono causare danni gravi all'imbotitura, al meccanismo ed al motore delle poltrone.

Importante inoltre sapere che l'appoggia piedi non è una seduta supplementare, quindi non sedersi sopra in quanto la poltrona può ribaltarsi ed il meccanismo danneggiarsi.

Importante sapere che la poltrona da Voi acquistata è stata collaudata ed è quindi garantita per l'utilizzo da parte di **persone con peso fino a kg.110.**

Piccoli rumori causati dalla movimentazione delle poltrone sono da considerarsi normali in quanto causati dai leveraggi dei meccanismi nel loro funzionamento.

Nelle poltrone dotate di ruote fare attenzione alla possibilità di spostamento delle stesse, durante la seduta o il sollevamento delle persone che le utilizzano.

Non fumare, non usare fiamme libere o oggetti che diano luogo a scintille pericolose nei pressi della poltrona, in quanto ne potrebbero causare l'incendio.

Non usare le poltrone in ambienti umidi, non mettere nei pressi o sopra le poltrone stesse materiali combustibili.

In alternativa alla compilazione dello spazio sopra riportato per l'attivazione del periodo di garanzia, possono essere allegati lo scontrino fiscale o la fattura rilasciati dal rivenditore.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO

POLTRONA MODELLO _____

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Le nostre poltrone relax, sono così composte:

- 1 telaio in legno o agglomerati dello stesso (multistrati, truciolare);
- 2 meccanismo in ferro;
- 3 per le versioni elettriche, i motori, telecomandi e trasformatori sono progettati in Italia e rispettano le direttive di sicurezza per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica (EMV) e i limiti di voltaggio stabiliti dalla direttiva europea 2004/108/EC. Alimentazione input 100/240 V, 50/60 Hz trasformata in DC 29V.
- 4 imbottiture in poliuretano espanso indeformabile con densità variabile. Le densità della gomma a seconda dei modelli sono le seguenti:
 - per lo schienale da Kg/metro cubo 21 a 30;
 - per il sedile da Kg/metro cubo 30 a 50;
 - per i braccioli da Kg/metro cubo 25 a 50;
- in alcuni modelli il poliuretano espanso viene rivestito in fibra sintetica;
- 5 il peso delle poltrone a vuoto può variare dai 30 ai 70 Kg;

Le nostre poltrone relax possono sollevare persone aventi peso fino a 110 kg; per persone più pesanti contattare l'azienda produttrice per eventuali modifiche di rinforzo.

Per le persone molto pesanti la nostra poltrona denominata XXL può sollevare persone aventi peso fino a 200 kg.

GARANZIA

Tutte le parti della struttura in legno ed in acciaio e tutte le parti elettriche sono garantite per il periodo di mesi 24 dalla data di acquisto delle poltrone.

Durante tale periodo la nostra ditta si impegna alla sostituzione o alla riparazione gratuita di quelle parti che dovessero risultare difettose per errata fabbricazione e non per errato utilizzo delle poltrone da parte dell'utente.

Le riparazioni vengono effettuate nella nostra sede alla quale pertanto, dovranno essere recapitati gli eventuali resi con spese di spedizione a carico del cliente.

A riguardo della richiesta di riparazioni presso il domicilio del cliente, dovranno essere sommati in aggiunta ad eventuali costi per la riparazione anche i costi del viaggio e i costi orari del tecnico calcolati a seconda della distanza del cliente dalla sede della Ditta o dal più vicino rivenditore.

Per la riparazione delle nostre poltrone, usare accessori e componentistica originale.

L'utilizzo di componenti non originali fa decadere la garanzia sul prodotto.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

La garanzia non include:

- a) la riparazione per rotture dovute ad un uso non corretto delle poltrone;
- b) la riparazione dei rivestimenti in tessuto, pelle o similpelle delle poltrone.

Per ogni controversia l'unico Foro competente è quello di Udine.